

Модел 7600/7800

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

Сърдечен тригер монитор



Показан е модел 7800

Съдържание


1.0 ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	1
2.0 ХРОНОЛОГИЯ НА РЕДАКЦИИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО	2
3.0 ГАРАНЦИЯ	3
4.0 ВЪВЕДЕНИЕ	4
5.0 БЕЗОПАСНОСТ	5
5.1 Основни характеристики	5
5.2 Електрически параметри	5
5.3 Взривобезопасност	7
5.4 Свързване към пациента	7
5.5 Ядрено-магнитен резонанс	7
5.6 Пейсмейкъри	8
5.7 Електрохирургическа защита	8
5.8 Защита при дефибрилация	8
5.9 Амплитуда на сигнала	8
5.10 Електромагнитна съвместимост (EMC)	8
5.11 Аксесоари	9
5.12 Указания и декларация на производителя – Електромагнитни емисии	9
5.13 Указания и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост	10
5.14 Речник на символите	12
6.0 ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА	15
6.1 Употреба по предназначение	16
6.2 Група пациенти	16
6.3 Противопоказания	16
6.4 Класификация (в съответствие с ANSI/AAMI ES60601-1)	16
6.5 Органи за управление и индикатори	17
6.6 Дисплей	18
6.7 Съобщения за аларми	18
6.8 Програмируеми сензорни бутони	19
6.9 Структура на менюто	20
6.10 Заден панел	21
6.11 Характеристики на предпазителите	21
6.12 Описание на задния панел	22
7.0 НАСТРОЙКА НА МОНИТОРА	23
7.1 Инсталиране на монитора	23
7.2 Настройване на инструмента за работа	23
7.3 Задаване на дата и час	24
7.4 Задаване на QRS и сила на звука на аларма	24
7.5 Задаване на граници на аларма	24
7.6 Задаване на скорост на кривата	24
7.7 Настройки по подразбиране	25
8.0 СИНХРОНИЗИРАН ИЗХОД	26
8.1 Синхронизиращ импулс	26
8.2 Знак на тригера	26
8.3 Блокировка на полярността (P-LOCK)	26
9.0 МОНИТОРИНГ НА ЕКГ	27
9.1 Съобщения за безопасност	27
9.2 Свързване към пациента	28
9.3 ЕКГ електроди	29
9.4 Измерване на импеданса (само за модел 7800)	29

СЪДЪРЖАНИЕ

9.5 Амплитуда (размер) на ЕКГ кривата.....	31
9.6 ЕКГ режекторен филтър.....	31
9.7 Избор на отвеждане	32
9.8 Съобщение за слаб сигнал.....	33
9.9 Пейсмейкър.....	33
9.10 Граници на аларма	33
10.0 РАБОТА ПРИ СВЪРЗВАНЕ В СИСТЕМА	35
10.1 Съобщения за състояние на рентген (само за модел 7800).....	35
11.0 ЗАПАЗВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗА ЕКГ	36
11.1 Прехвърляне на данни за ЕКГ с помощта на USB порта (само за модел 7800).....	36
11.2 USB порт	36
12.0 РАБОТА НА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО.....	37
12.1 Смяна на хартията.....	37
12.2 Режими на работа на записващото устройство	38
12.3 Скорост на записващото устройство.....	39
12.4 Пробни разпечатки.....	39
13.0 СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМИ	40
13.1 Напомнящи сигнали.....	40
13.2 Аларми за пациент	40
13.3 Технически аларми	41
13.4 Информационни съобщения	41
14.0 ТЕСТВАНЕ НА МОНИТОРА	42
14.1 Вътрешен тест	42
14.2 Симулатор на ЕКГ	42
14.3 Работа със симулатора на ЕКГ	43
15.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	44
16.0 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ	45
16.1 Монитор.....	45
16.2 Магистрални кабели за ЕКГ и проводници на отвеждания.....	45
16.3 Профилактична поддръжка.....	45
17.0 АКСЕСОАРИ	46
17.1 Магистрални кабели за ЕКГ.....	46
17.2 Метални проводници на отвеждания за ЕКГ	46
17.3 Въглеродни проводници на отвеждания за ЕКГ	46
17.4 ЕКГ електроди и подготовка на кожата.....	47
17.5 Решения за монтиране	47
17.6 Разни аксесоари.....	47
18.0 ИЗХВЪРЛЯНЕ	48
18.1 Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)	48
18.2 Директива 2011/65/ЕС относно ограничаване на опасните вещества (RoHS2).....	48
18.3 Стандарт на електронната промишленост на Китайската народна република SJ/T11363-2006.....	48
19.0 СПЕЦИФИКАЦИИ.....	49
20.0 РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ	54

1.0 ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Този продукт ще работи според описанието, съдържащо се в това Ръководство за работа и придружаващите го етикети и/или листовки, ако се монтира, работи, поддържа и ремонтира в съответствие с дадените указания. Този продукт трябва да бъде проверяван периодично. Дефектен продукт не трябва да се използва. Части, които са повредени, липсват или са очевидно износени, деформирани или замърсени, трябва да се подменят незабавно. В случай че се наложи такъв ремонт или подмяна, Ivy Biomedical Systems, Inc. препоръчва да се обадите по телефона или да изпратите писмена заявка на Отдела за обслужване на Ivy Biomedical Systems, Inc., за да получите съвет относно обслужването. Този продукт или която и да било негова част не трябва да се ремонтират по друг начин, освен в съответствие с инструкциите, дадени от обучен персонал на Ivy Biomedical Systems, Inc. Продуктът не трябва да се изменя без предварително писмено съгласие от Отдела за осигуряване на качество на Ivy Biomedical Systems, Inc. Потребителят на този продукт носи изцяло отговорността за всякакви повреди, възникнали вследствие на неправилна употреба, неправилна поддръжка, неправилен ремонт, повреда или изменение, извършени от лица, които не са част от Ivy Biomedical Systems, Inc.

 **ВНИМАНИЕ:** Съгласно федералното законодателство на САЩ това устройство трябва да се продава само на или по поръчка на медицинско лице със съответно разрешение.



Ivy Biomedical Systems, Inc.

11 Business Park Drive

Branford, Connecticut 06405 USA

+1 203.481.4183 • +1 800.247.4614 • ФАКС +1 203.481.8734

www.ivybiomedical.com имейл: sales@ivybiomedical.com

Многоезични преводи на това ръководство за работа могат да бъдат намерени на уебсайта на Ivy Biomedical: www.ivybiomedical.com

ХРОНОЛОГИЯ НА РЕДАКЦИИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

2.0 ХРОНОЛОГИЯ НА РЕДАКЦИИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Редакция	Дата	Описание
00	20 Ноември 2013 г.	Първоначално издание
01	9 март 2015 г.	Актуализирани EMC Ръководство и декларация на производителя на страници 8, 9 и 10. Добавя EAC символ на отговорностите на потребителя раздел на страница 1. Актуализира всички позовавания на OEEО Директива за 2012/19/ЕС. Преработен всички позовавания на предпазителя и тип на T 0,5A, 250V.
02	2 септември 2015 г.	Преработен всички позовавания на предпазителя и тип на T 0,5AL, 250V.
03	8 юни 2016 г.	Преработени раздели 6,10 и 6,12.
04	1 март 2017 г.	Преработен раздел 19,0 включва допълнителни регулятивни норми.
05	15 март 2017 г.	Раздел 5,0 е преработен съгласно новите изисквания за IEC 60601-1-2:2014.
06	15 юни 2018 г.	Преработен раздел 19,0 включва допълнителни регулятивни норми.
07	19 февруари 2019 г.	Преработен раздел 19,0 за актуализиране на регулаторните норми.
08	14 октомври 2019 г.	Преработен раздел 5,6.
09	21 септември 2020 г.	Актуализирано в съответствие с EU-MDR.

3.0 ГАРАНЦИЯ

При нормална употреба за всички изделия, произведени от Ivy Biomedical Systems, Inc., се гарантира, че нямат дефекти по отношение на материала и изработката и функционират в рамките на посочените спецификации за срок от 13 месеца от датата на първоначалната доставка.

При нормална употреба за всички аксесоари, като например магистрални кабели за ЕКГ и проводници на отвежданията, доставени от Ivy Biomedical Systems, Inc., се гарантира, че нямат дефекти по отношение на материала и изработката и функционират в рамките на посочените спецификации за срок от 90 дни от датата на първоначалната доставка.

Ако при проверка от Ivy Biomedical Systems, Inc. се установи, че такива изделия или съставни части са дефектни, тогава Ivy се задължава да вземе решение дали да ремонтира, или да подмени изделието.

Ако искате да върнете на производителя продукт или продукти за ремонт или проверка, трябва да се свържете със сервизния персонал на Ivy Biomedical Systems, за да получите номер на Оторизация за връщане на продукт (RMA #) и точни инструкции за опаковане.

Сервиз/Техническа поддръжка:

Телефон: +1 203.481.4183 или +1 800.247.4614

Факс: +1 203.481.8734

Имейл: service@ivybiomedical.com

Всички продукти, връщани за гаранционен ремонт, трябва да се изпращат с предплатена доставка на адрес:

Ivy Biomedical Systems, Inc
На вниманието на: Service Department (Отдел за обслужване)
11 Business Park Drive
Branford, CT 06405 USA

Ivy ще заплати доставката на ремонтирания или подменен продукт до клиента.

4.0 ВЪВЕДЕНИЕ

Това ръководство предоставя информация за правилното използване на сърдечен тригер монитор, модел 7600/7800. Потребителят трябва да гарантира спазването на всички действащи разпоредби, свързани с инсталирането и работата на монитора.

Моделът 7600/7800 е МЕ ОБОРУДВАНЕ (Медицинско електрическо оборудване), което се използва за мониторинг на пациенти под медицинско наблюдение. Мониторът, модел 7600/7800, трябва да се използва само от обучен и квалифициран персонал.

Използване на настоящото ръководство

Препоръчваме ви да прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате оборудването. Настоящото ръководство съдържа описание на всички опции. Ако мониторът ви не включва всички опции, възможностите за избор в менюта и показваните данни за тези опции няма да се появяват на вашия монитор.

Направете справка с раздела „Описание на монитора“ за общите описания на органите за управление и дисплеите. За по-подробна информация относно използването на всяка опция вижте раздела в ръководството, касаещо съответната опция.

С получер шрифт в текста са посочени надписите на потребителските органи за управление. В скоби [] са дадени възможностите за избор в менютата, използвани с програмируемите сензорни бутони.

Отговорност на производителя

Производителят на това оборудване носи отговорност за безопасността, надеждността и функционирането на оборудването само ако:

- Операциите по сглобяване, разширение, промяна на настройките или ремонт се извършват от лица, упълномощени от производителя.
- Електрическата инсталация съответства на всички действащи разпоредби.
- Оборудването се използва съгласно указанията в това ръководство.

Неправилното използване или неспазването на процедурите за правилна поддръжка на монитора от страна на потребителя освобождават производителя или неговия представител от цялата отговорност за последващо несъответствие, повреда или нараняване.

Ivy Biomedical Systems, Inc.

11 Business Park Drive
Branford, Connecticut 06405
+1 203.481.4183 или +1 800.247.4614
Факс +1 203.481.8734
Имейл: sales@ivybiomedical.com

Това ръководство обяснява как да настроите и използвате модела 7600/7800. Важната информация за безопасност се намира в ръководството, където е подходящо. **ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МОНИТОРА.**

5.0 БЕЗОПАСНОСТ

5.1 Основни характеристики

Списък на основните характеристики (дефинирани в Доклад за изпитване съгласно IEC 60601-1):

- Да наблюдава и показва сърдечната честота на пациента точно (в границите на 60601-2-27).
- Да наблюдава и показва формата на вълната на ЕКГ на пациента точно (в границите на 60601-2-27).
- Да се произведе изходен импулс на R-зъбец за осигуряване на правилно, точно и надеждно задействане.
- Да издава алармен сигнал, когато е необходима намеса на оператора.

5.2 Електрически параметри

Този продукт е предназначен за работа с източник на електрозахранване с 100 – 120 V~ или 200 – 230 V~, 50/60 Hz и максимална консумация на променлив ток 45 VA.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се избегне опасност от токов удар, това оборудване трябва да се свързва само към електрическа мрежа със защитно заземяване. Свързвайте монитора само към заземен трижилен контакт от болничен клас. Трижилният щепсел трябва да се включва в подходящо свързан трижилен контакт. При липса на трижилен контакт квалифициран електротехник трябва да монтира такъв в съответствие с действащия правилник за електроинсталации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства не отстранявайте заземяващия проводник от захранващия щепсел.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващият кабел, доставен с това оборудване, осигурява тази защита. Не се опитвайте да изключите тази защита, като видоизменяте кабела или използвате незаземени адаптери или удължители. Захранващият кабел и щепселът трябва да бъдат изправни и неповредени. За да изключите оборудването от мрежовото електрозахранване, извадете захранващия кабел от контакта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте оборудването към електрически контакт, който се управлява със стенов ключ или регулатор.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако се съмнявате в изправността на свързването на защитния заземяващ проводник, не включвайте монитора, докато заземяващият проводник на източника на електрозахранването не е напълно изправен.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При прекъсване на захранването за повече от 30 секунди мониторът трябва да се включи ръчно, като се натисне превключвателят **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим). Когато се възстанови захранването на монитора, той ще се върне към настройките ПО ПОДРАЗБИРАНЕ на производителя. (Съществува опция, при която мониторът използва последно използваните или ЗАПАМЕТЕНИ настройки.)


БЕЗОПАСНОСТ


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се избегне нежелана ОПАСНОСТ, причинена от прекъсване на електрозахранването, свържете монитора към подходящ източник на непрекъснато захранване (UPS), предназначен за медицинско оборудване.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поставяйте монитора на място, от което той може да падне върху пациента. Не повдигайте монитора, като го хващате за захранващия кабел или магистралния кабел за ЕКГ.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изберете внимателно местата на преминаване на кабелите на монитора (магистрални кабели за ЕКГ, захранващи кабели и т.н.), за да намалите възможността от спъване в тях.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позиционирайте монитора по начин, който би затруднил оператора при изключване на апарата от източника на захранване.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от токов удар!** Не сваляйте капаците или панелите. За сервизно обслужване се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** По време на сервиз изключвайте монитора от източника на захранване. За сервизно обслужване се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всички сменяеми части трябва да се сменят от обучен и квалифициран сервизен персонал.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите токов удар, разединете монитора от източника на електрозахранване преди смяна на предпазителите. Подменяйте предпазителите само с такива от същия тип и номинална мощност: T 0,5 AL, 250 V.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не почиствайте монитора, ако е включен в източник на електрозахранване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако случайно уредът се овлажни, незабавно изключете монитора от източника на електрозахранване. Прекратете употребата на уреда, докато изсъхне, а след това проверете дали работи правилно, преди отново да го използвате при пациент.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Това устройство използва обща изолационна верига за ЕКГ отвежданията и електродите. Не допускайте ЕКГ отвежданията и/или електродите да се допират до други проводими части, в това число и към заземяващия кабел. Не свързвайте никакви неизолирани аксесоари към ЕКГ входа, когато той е свързан към пациент, тъй като това би застрашило безопасността на уреда. Когато включвате уреда към други устройства, се уверете, че общата стойност на тока на утечка на всички свързани устройства не надвишава 300 μ A.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Синхронизиращият изходен импулс не е предназначен да синхронизира разряд на дефибрилатор или процедура за кардиоверзио.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се гарантира правилната вентилация на монитора, не го използвайте без краката на долния капак или опционалната монтажна пластина на долния капак.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не модифицирайте това оборудване без разрешение на производителя.

5.3 Взривобезопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия!** Не използвайте това оборудване при наличието на запалими анестетици или други вещества, запалими при смесването им с въздух, обогатена с кислород среда или азотен оксид.

5.4 Свързване към пациента

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимателно прокарайте магистралните кабели за ЕКГ, за да намалите възможността от заплитане или задушаване.

Кабелите за свързване към пациента са електрически изолирани. За всички свързвания използвайте изолирани клеми. Не допускате кабелите за свързване към пациента да се докосват до други проводими части, в това число и към заземяващия кабел. Вижте инструкциите за свързване на пациента в това ръководство.


Токът на утечка е вътрешно ограничен от монитора до по-малко от 10 μ A. Винаги обаче трябва да отчитате сумарния ток на утечка, който може да бъде предизвикан от друго оборудване, използвано върху пациента едновременно с този монитор.

За да гарантирате, че защитата от ток на утечка остава в рамките на спецификациите, използвайте само магистралните кабели за ЕКГ, посочени в настоящото ръководство. Този монитор е снабден със защитени проводници на отвежданията. *Не използвайте* кабели и отвеждания с незащитени проводници на отвеждания, чиито проводници са оголени в края на кабела. Незащитените проводници на отвеждания и кабели могат да доведат до ненужен риск от възникване на неблагоприятни последици за здравето или смърт.

Импулсните шумове на устройството за контрол на izolацията могат да наподобят действителни сърдечни криви и по този начин да предотвратят задействането на аларми за сърдечната честота. За да сведете този проблем до минимум, се уверете в правилното поставяне на електродите и разполагане на кабелите.

Ако се задейства състояние на аларма, докато алармите са изключени, няма да се включат нито звукови, нито визуални аларми.

5.5 Ядрено-магнитен резонанс

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно при MR!** Не излагайте модел 7600 и 7800 на среда с магнитен резонанс (MR). Моделите 7600 и 7800 могат да представляват риск от нараняване от преминаващи феромагнитни предмети, които могат да бъдат привлечени от магнитната сърцевина на MR.

БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Термични наранявания и изгаряния могат да възникнат поради металните компоненти на устройството, които могат да се нагряят по време на MR сканиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството може да генерира артефакти в MR изображението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството може да не функционира правилно поради силните магнитни и радиочестотни полета, генерирани от MR скенера.

5.6 Пейсмейкъри



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПАЦИЕНТИ С ПЕЙСМЕЙКЪР: Измервателните уреди на честотата могат да продължават да отчитат честотата от пейсмейкъра при спиране на сърцето или при някои аритмии. Не разчитайте изцяло на АЛАРМЕНИТЕ СИГНАЛИ на измервателния уред на честотата. ПАЦИЕНТИТЕ с пейсмейкър трябва да бъдат поставени под непосредствено наблюдение. Вижте раздел „СПЕЦИФИКАЦИИ“ в това ръководство, за да се запознаете с възможностите на този уред да филтрира импулсите от пейсмейкъра. Не е разгледано филтрирането на импулсите от последователен предсърдно-камерен и двойнокамерен пейсмейкър – не разчитайте на филтрирането на импулси от пейсмейкър при пациенти с двойнокамерни пейсмейкъри.

5.7 Електрохирургическа защита

Това оборудване е тествано в съответствие с EN 60601-2-27.

Този апарат е защитен срещу електрохирургически потенциали. За да се избегне възможността от електрохирургически изгаряния на местата на мониториране, се уверете в правилното свързване на електрохирургическата обратна верига съгласно указанията на производителя. Ако тя е свързана неправилно, някои електрохирургически елементи може да допуснат обратно преминаване на електроенергия през ЕКГ електродите. Това оборудване се връща към нормална работа за по-малко от 10 секунди.

5.8 Защита при дефибрилация

Това оборудване е защитено до 360 J разряд на дефибрилатора. Мониторът има вградена защита за ограничаване на тока през електродите, за да се избегне нараняване на пациента и повреда на оборудването по време използване на дефибрилатора в съответствие с указанията на производителя. Използвайте само посочени от Ivu аксесоари (вижте „Аксесоари“).

5.9 Амплитуда на сигнала





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Минималната амплитуда на сигнала при физиологичния „R-зъбец“ на пациента е 0,5 mV.


Употребата на модел 7600/7800 под горепосочената стойност на амплитудата може да даде неточни резултати.


5.10 Електромагнитна съвместимост (EMC)

Това оборудване е сертифицирано за защита от емисии и устойчивост съгласно IEC-60601-1-2:2014 за използване в болница и малка клиника.


 **ВНИМАНИЕ:** Медицинското оборудване се нуждае от специални предпазни мерки по отношение на ЕМС и трябва да се инсталира и пусне в експлоатация в съответствие с информацията за ЕМС, предоставена в Ръководството за работа.

 **ВНИМАНИЕ:** Портативно и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване може да окаже влияние върху електромедицинското оборудване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Това устройство не е тествано за използване в присъствието на различни потенциални източници на ЕМС/ЕМИ, като диатермия, радиочестотна идентификация (RFID), електромагнитни системи за сигурност (напр. металотърсачи) и др. Трябва да се внимава при работа с това устройство при наличие на такива устройства.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Модел 7600/7800 не трябва да се използва в близост до или върху друг апарат. Ако обаче това е необходимо, модел 7600/7800 трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната му работа в конфигурацията, в която се използва.

5.11 Аксесоари

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Употребата на аксесоари, различни от посочените в раздела „Аксесоари“ в това ръководство, може да доведе до увеличаване на емисии или намаляване на устойчивостта на оборудването.

5.12 Указания и декларация на производителя – Електромагнитни емисии


Указания и декларация на производителя - Електромагнитни емисии		
Мониторът, модел 7600/7800, е предназначен за употреба в указаната по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на модел 7600/7800 трябва да се увери, че същият се използва в такава среда.		
Тест за емисии	Съответствие	Електромагнитна среда - указания
Радиочестотни емисии CISPR 11 – излъчени	Група 1 Клас В	Моделът 7600/7800 използва радиочестотна енергия само за служебни функции. Следователно радиочестотните му емисии са много ниски и няма вероятност да причинят смущения в близко разположено електронно оборудване.
Радиочестотни емисии CISPR 11 – проведени	Клас В	Модел 7600/7800 е подходящ за употреба във всякакви сгради, с изключение на жилищни и такива, свързани директно към обществената електрическа мрежа с ниско напрежение, която захранва жилищни сгради.
Емисии на хармоници IEC 61000-3-2	Клас А	
Колесания в напрежението/ емисии на фликера IEC 61000-3-3	Клас А	

5.13 Указания и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост

Указания и декларация на производителя - Електромагнитна устойчивост			
Мониторът, модел 7600/7800, е предназначен за употреба в указаната по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на модел 7600/7800 трябва да се увери, че същият се използва в такава среда.			
Тест за устойчивост	Ниво на теста IEC 60601	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда - указания
Електростатичен разряд (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV контакт ±15 kV въздух	±9 kV контакт ±15 kV въздух	Подовите трябва да бъдат дървени, бетонни или покрити с керамични плочки. Ако подовите са покрити със синтетичен материал, относителната влажност трябва да бъде поне 30%.
Бързи електрически преходни процеси/ пакет импулси IEC 61000-4-4	±2 kV при захранващи линии ±1 kV за входно/ изходни линии 100 kHz честота на повторение	±3 kV при захранващи линии ±1,5 kV за входно/ изходни линии 100 kHz честота на повторение	Качеството на мрежовото електрозахранване трябва да бъде обичайното за търговска или болнична среда.
Пренапрежение IEC 61000-4-5	±1 kV диференциален режим ±2 kV синфазен режим	±1,5 kV диференциален режим ±3 kV синфазен режим	Качеството на мрежовото електрозахранване трябва да бъде обичайното за търговска или болнична среда.
Спадове на напрежението, кратки прекъсвания и колебания на напрежението при входните електрозахранващи линии IEC61000-4-11	0% U_T : 0,5 цикъл при 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 градуса. 0% U_T : 1 цикъл и 70% U_T ; 25/30 цикъла. Монофазни: при 0 градуса 0% U_T ; 250/ 300 цикъла.	0% U_T : 0,5 цикъл при 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 градуса. 0% U_T : 1 цикъл и 70% U_T ; 25/30 цикъла. Монофазни: при 0 градуса 0% U_T ; 250/ 300 цикъла.	Качеството на мрежовото електрозахранване трябва да бъде обичайното за търговска или болнична среда. Ако на потребителя на модел 7600/7800 му е необходима непрекъсната работа при прекъсвания в електрозахранването, препоръчваме уредът да бъде защитен от източник на непрекъснато електрозахранване.
Магнитно поле с честота на захранващата мрежа (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz или 60 Hz	30 A/m 50 Hz и 60 Hz	Магнитните полета с честотата на захранващата мрежа трябва да бъдат на нива, характерни за обичайно разположение в обичайна търговска или болнична среда.

Указания и декларация на производителя - Електромагнитна устойчивост

Мониторът, модел 7600/7800, е предназначен за употреба в указаната по-долу електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на модел 7600/7800 трябва да се увери, че същият се използва в такава среда.

Тест за устойчивост	Ниво на теста IEC 60601	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда - указания
Проведена радиочестота IEC 61000-4-6	3 Vrms от 150 kHz до 80 MHz 6 Vrms в ISM ленти между 0,15 MHz и 80 MHz 80% AM при 2 Hz	5 Vrms от 150 kHz до 80 MHz 6 Vrms в ISM ленти между 0,15 MHz и 80 MHz 80% AM при 2 Hz	Портативно и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване трябва да се използва на такова разстояние от всяка част на модел 7600/7800, в това число и кабели, което е не по-малко от препоръчителното отстояние, изчислено по уравнението, приложимо за честотата на предавателя. Препоръчително отстояние $d = 1,2 \sqrt{p}$ $d = 1,2 \sqrt{p}$ 80 MHz до 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{p}$ 800 MHz до 2,7 GHz Където p е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя, а d е препоръчителното отстояние в метри (m).
Излъчена радиочестота IEC 61000-4-3, включително клауза 8.10, таблица 9, за близост до безжични устройства.	3 V/m 80 MHz до 2,7 GHz 80% AM при 2 Hz Включително клауза 8.10, таблица 9, за близост до безжични устройства	10 V/m 80 MHz до 2,7 GHz 80% AM при 2 Hz Включително клауза 8.10, таблица 9, за близост до безжични устройства	Интензитетът на полетата от неподвижни радиочестотни предаватели, определен от електромагнитното изследване на мястото ^a , трябва да бъде по-слаб от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон ^b Може да се получат смущения в близост до оборудване, обозначено със следния символ: 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 – При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон.

ЗАБЕЛЕЖКА 2 – Тези указания може да не важат във всички случаи. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отражението на сгради, предмети и хора.






^a Интензитетът на полетата от неподвижни предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжични) и мобилни радиостанции, любителски радиостанции, AM и FM радиопредавания и ТВ излъчване, не може да бъде предвиден теоретично с голяма точност. За да се направи оценка на електромагнитната среда при наличието на неподвижни радиочестотни предаватели, трябва да се извърши електромагнитно изследване на място. Ако измереният интензитет на полето на мястото, на което се използва модел 7600/7800, надвишава горепосоченото приложимо ниво на съответствие за радиочестотно излъчване, модел 7600/7800 трябва да се наблюдава непрекъснато, за да се гарантира нормалната му работа. Ако бъдат забелязани отклонения от нормалната работа, трябва да се вземат допълнителни мерки, като например промяна на ориентацията или местоположението на модел 7600/7800.










^b В честотния диапазон от 150 KHz до 80 MHz интензитетът на полето трябва да бъде под 3 V/m.

5.14 Речник на символите

Стандартен референтен номер и заглавие

- Референции 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.4.3 и 5.4.4 в ISO 15223-1: Медицински изделия. Символи, използвани в етикетите, при етикетирание и в предоставяната информация за медицински изделия. Част 1: Общи изисквания
- Референция W001 в ISO 7010: Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност.
- Референции 5009, 5016, 5017, 5021, 5032, 5034, 5035, 5036, 5336 и 5448 в IEC 60417: Графични символи за използване за оборудване
- Референция 5576 в ISO 7000: Графични символи за използване на регистрирани символи на оборудване
- Референция 7.3.3 в IEC 62570: Стандартна практика за маркиране на медицински изделия и други предмети за безопасност в магнитно-резонансната среда

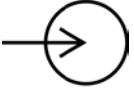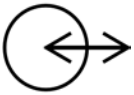Символ	Заглавие	Обяснителен текст	Стандартен референтен номер
  Индикатор eIFU	Направете справка с указанията за употреба	<p>Показва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба</p> <p>Когато се използва за посочване на инструкция за справка с електронни инструкции за употреба (eIFU), този символ е придружен от индикатор eIFU (уебсайт на eIFU) и е поставен в непосредствена близост до символа.</p>	Референция 5.4.3 в ISO 15223-1
	Общ предупредителен знак	За указване на общо предупреждение	Референция W001 в ISO 7010
	Внимание	Показва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба за важна предпазна информация, като предупреждения и предпазни мерки, които не могат по различни причини да присъстват на самото медицинско изделие	Референция 5.4.4 в ISO 15223-1
	Устойчива на дефибрилации приложна част тип CF	За идентифициране на устойчива на дефибрилации приложна част тип CF в съответствие с IEC 60601-1	Референция 5336 в IEC 60417

Символ	Заглавие	Обяснителен текст	Стандартен референтен номер
	Конектор (със заземяване) за изравняване на потенциалите	За идентифициране на терминалите, които, когато са свързани заедно, привеждат различната част от оборудването или системата до един и същ потенциал, като не е задължително да е земния потенциал	Референция 5021 в IEC 60417
	Заземяване (земя)	За идентифициране на терминал за земя в случаите, когато нито символът 5018, нито 5019 е изрично задължително	Референция 5017 в IEC 60417
	Тип/номинални характеристики на предпазителя	За идентифициране на кутиите с предпазители или тяхното местоположение	Референция 5016 в IEC 60417
	Изходен сигнал	За идентифициране на изходен терминал, когато е необходимо да се прави разлика между входове и изходи	Референция 5035 в IEC 60417
	Входен сигнал	За идентифициране на входен терминал, когато е необходимо да се прави разлика между входове и изходи	Референция 5034 в IEC 60417
	Входен/изходен сигнал	За идентифициране на комбиниран входен/изходен конектор или режим	Референция 5448 в IEC 60417
	Променлив ток	Посочете на табелката с данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток	Референция 5032 в IEC 60417
	Включване/ Стендбай режим	За идентифициране на положението на превключвателя, чрез което част от оборудването е включено, за да го приведе в състояние на готовност	Референция 5009 в IEC 60417
	Изключване на звука на алармата	За идентифициране на контрола, чрез който звънецът може да бъде изключен или за индикация на работното състояние на звънеца	Референция 5576 в ISO 7000

Символ	Заглавие	Обяснителен текст	Стандартен референтен номер
	Каталог или номер	Показва каталожния номер на производителя, за да може да се идентифицира медицинското изделие	Референция 5.1.6 в ISO 15223-1
	Производител	Показва производителя на медицинско изделие, както е определено в директиви на ЕС 90/385/ЕИО, 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО.	Референция 5.1.1 в ISO 15223-1
	Дата на производство	Показва датата, на която е произведено медицинското изделие.	Референция 5.1.3 в ISO 15223-1
	СЕ маркировка	Показва, че устройството отговаря на приложимите европейски разпоредби	Директива относно медицинските изделия 93/42/ЕИО, Приложение XII
	Упълномощен представител в Европейската общност	Посочва упълномощения представител в Европейската общност	Референция 5.1.2 в ISO 15223-1
	Медицинско изделие	Показва, че артикулът е медицинско изделие.	Не е приложимо
RoHS	RoHS	Съответствие с RoHS	Директива 2011/65/ЕС относно ограничаване на опасните вещества (RoHS)
	Опасно при MR	За идентифициране на елемент, който представлява неприемливи рискове за пациента, медицинския персонал или други лица в MR средата	Референция 7.3.3 в IEC 62570
	Съответствие с WEEE	Показва съответствие с Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване	Директива WEEE 2012/19/ЕС
	Опасно напрежение	За посочване на опасностите, произтичащи от опасно напрежение	Референция 5036 в IEC 60417

6.0 ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА

Моделът 7600/7800 е лесен за употреба сърдечен тригер монитор, който разполага с ярък цветен сензорен LCD дисплей. Моделът 7600/7800 показва два едновременни ЕКГ вектора и сърдечната честота на пациента. Синхронизиращият ЕКГ вектор (горната ЕКГ крива) може да бъде избран от Leads I, II III или Auto. Вторият ЕКГ вектор (долната ЕКГ крива) може да бъде избран от Leads I, II или III. Освен това могат да бъдат настроени граници на аларми за висока и ниска сърдечна честота, за да се определят рамки на сърдечната честота на пациента, така че при нарушаване на тези граници да се генерира звукова и визуална индикация на нарушението. Цветният дисплей на модел 7600/7800 включва двойни ЕКГ криви, големи числа за сърдечната честота и цифрено-буквени символи за други данни, алармени съобщения, менюта и потребителска информация.

- Мониторът, модел 7600/7800, е предназначен основно за употреба при пациенти за приложения, изискващи точна синхронизация на R-зъбеца, като например образна диагностика с отчитане на времето.
- Модел 7600/7800 включва функция за избор на отвеждане AUTO (само за отвеждане на тригер). Когато тази функция е избрана, тя ще определи кое отвеждане (I, II или III) осигурява ЕКГ сигнал с най-добро качество, а по този начин – по-надежден сърдечен тригер.
- Модел 7600/7800 има електрически изолиран RS-232 микро-D конектор, който осигурява двупосочна комуникация между монитора и външната конзола за трансфер на ЕКГ данни.
- Модел 7600/7800 се предлага с различни опции - не всички опции са включени във всички монитори. Предлага се допълнително вградено записващо устройство. Настройката на функциите на записващото устройство се извършва чрез менютата от сензорния екран на монитора.
- Модел 7600/7800 е подходящ за употреба при електрохирургия.
- Модел 7600/7800 не е предвиден за употреба с други устройства за физиологичен мониторинг.
- Модел 7600/7800 може да се използва само за един пациент в даден момент.

Само за модел 7800:

- Модел 7800 има специален хардуер и софтуер, който позволява измерване на импеданса на прехода кожа - електрод.
- Модел 7800 съдържа два Ethernet канала на един RJ45 конектор. Първият канал предоставя двупосочна комуникация между монитора и конзолата на компютърния томограф за предаването на ЕКГ данни, данни за пусковия момент при синхронизация и получаването на информация за идентификация на пациента. Вторият канал предоставя ЕКГ данни към дисплея на гентри отвора на компютърния томограф. Тези функции ще са достъпни само ако моделът 7800 е електрически свързан към конзолата на компютърния томограф и гентри отвора на компютърния томограф, които могат да показват ЕКГ данни.
- Моделът 7800 е снабден с USB устройство, което позволява на оператора да съхранява и извлича ЕКГ данни на USB външна памет.
- Моделът 7800 е снабден с допълнителен 9-пинов D-свърхминиатюрен конектор, който осигурява специализиран интерфейс за специфични инсталации.

ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА

6.1 Употреба по предназначение

Сърдечните тригер монитори Ivy Biomedical модел от серия 7000 са лесни за използване инструменти за наблюдение на ЕКГ и сърдечен ритъм. Те са предназначени за използване в условията на интензивно отделение, ССУ и операционна зала. Те могат да подават аларма, когато HR пада извън предварително зададените граници. Те осигуряват изходен импулс, синхронизиран с R-зъбеца за използване в приложения, изискващи прецизна синхронизация на R-зъбеца.

6.2 Група пациенти

Сърдечният тригер монитор от серия 7000 е предназначен за извършване на наблюдение на ЕКГ и откриване на пулса на R-зъбец при възрастни, педиатрични и новородени пациенти. Синхронизацията на R-зъбеца обикновено се използва за стробиране на ядрени скенери, КТ скенери или други устройства за изображения.

6.3 Противопоказания

Моделът от серия 7000 е ограничен за използване от обучени и квалифицирани медицински специалисти. Това устройство не е предназначено за използване като оборудване за поддържане на живота или за извършване на сърдечна диагностика. Продуктът не е предназначен за използване при наблюдение в домашни грижи или за използване в ЯМР среда.

6.4 Класификация (в съответствие с ANSI/AAMI ES60601-1)

Защита срещу токов удар:	Клас 1.
Степен на защита срещу токов удар:	Приложна част тип CF. Защита от дефибрилатор: ЕКГ
Степен на защита от опасно проникване на вода:	Обикновено оборудване IPX1 по IEC-60529
Методи на поддръжка и почистване:	Вж. раздел „Поддръжка и почистване“ в това ръководство
Степен на безопасност на приложение при наличие на запалима анестетична смес с въздух или кислород или азотен оксид:	Оборудване, неподходящо за използване в присъствието на запалима анестетична смес
Режим на работа:	Непрекъснат

6.5 Органи за управление и индикатори

Основни клавиши




Когато монитърът е включен към източник на захранване с променлив ток, при натиснат превключвател **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим) той подава ток към електронните вериги на монитора. Натиснете този превключвател отново, за да прекъснете захранването на електронните вериги на монитора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да изключите монитора от мрежовото захранване, извадете от контакта захранващия кабел за променлив ток.



Превключвателят **Alarm Mute** (Изключване на звука на алармата) деактивира звуковите аларми. Натиснете този клавиш отново, за да възстановите нормалното функциониране на алармите.

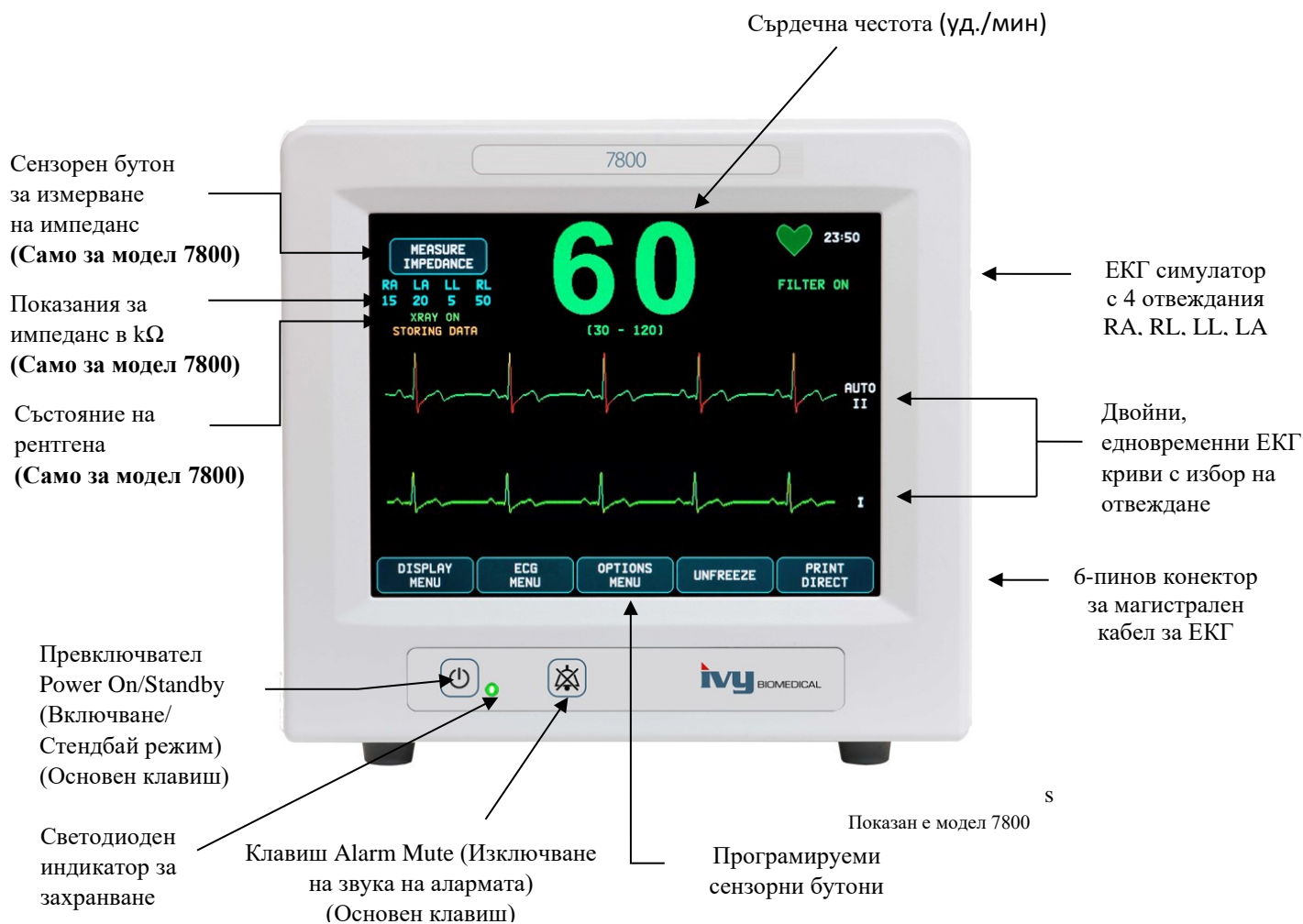

ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА

6.6 Дисплей

HEART RATE (СЪРДЕЧНА ЧЕСТОТА): Показва се с големи цифри в удари за минута (BPM) в горната част на екрана.

ECG (ЕКГ): Двойни едновременни ЕКГ криви се показват на екрана, като се движат отляво надясно. Синхронизиращата ЕКГ крива се показва отгоре, а втората ЕКГ крива се показва отдолу.

SETUP (НАСТРОЙКА): Настройките се извършват посредством менютата на сензорния екран. Вдясно от съответните криви са показани избраните отвеждания. Филтър ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) е показан в горния десен ъгъл на дисплея. Границите на алармата са показани точно под сърдечната честота.

Измерване на импеданса (само за модел 7800): Показва измерената стойност на импеданса между кожата на пациента и всеки отделен ЕКГ електрод (RA, LA, LL, RL). Измерванията на импеданса са разположени в горния ляв ъгъл на дисплея.

Състояние на рентгена (само за модел 7800): Показва състоянието на рентгеновия източник на КТ скенера. Съобщението за състоянието на рентгена се намира в горния ляв ъгъл на дисплея. Показваните съобщения са: XRAY OFF, XRAY ON или XRAY DISCONNECT (РЕНТГЕН Изкл., РЕНТГЕН Вкл. или ПРЕКЪСНАТ РЕНТГЕН).

6.7 Съобщения за аларми

ALARM MUTE

(ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА НА АЛАРМАТА): НАПОМНЯЩ СИГНАЛ, показващ, че звуковите аларми са изключени. Забележка: ALARM MUTE (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА НА АЛАРМАТА) е еквивалент на AUDIO OFF (ИЗКЛЮЧЕН ЗВУК).

Следните индикации за аларми се показват в негативен видео режим. Индикациите за аларми се появяват в центъра на екрана и премигват на всяка секунда.

LEAD OFF

(ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.): ТЕХНИЧЕСКА АЛАРМА, която показва, че има разединено отвеждане. Аларменото съобщение LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) ще се появи 1 секунда след установяването на грешката.

CHECK LEAD

(ПРОВЕРКА НА ОТВЕЖДАНИЯТА): ТЕХНИЧЕСКА АЛАРМА, която показва, че е отчетен дисбаланс между отвежданията. Аларменото съобщение CHECK LEAD (ПРОВЕРКА НА ОТВЕЖДАНИЯТА) ще се появи 1 секунда след установяването на грешката.

HR HIGH

(ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА):

АЛАРМА ЗА ПАЦИЕНТ, показваща, че горната граница за сърдечна честота е премината в продължение на три секунди.

HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА):

АЛАРМА ЗА ПАЦИЕНТ, показваща, че долната граница за сърдечна честота е премината в продължение на три секунди.

ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ):

АЛАРМА ЗА ПАЦИЕНТ, показваща, че интервалът между сърдечните удари е надхвърлил шест секунди.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звуковите аларми се поставят на пауза за 30 секунди, докато мониторът загрява. При заявка са възможни и други опции в конфигурацията.

6.8 Програмируеми сензорни бутони


При натискането на програмируем сензорен бутон ще се покажат други нива на менютата или ще се активира съответната функция. Функциите на менютата са описани в „Структура на менюто“.

ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА

6.9 Структура на менюто

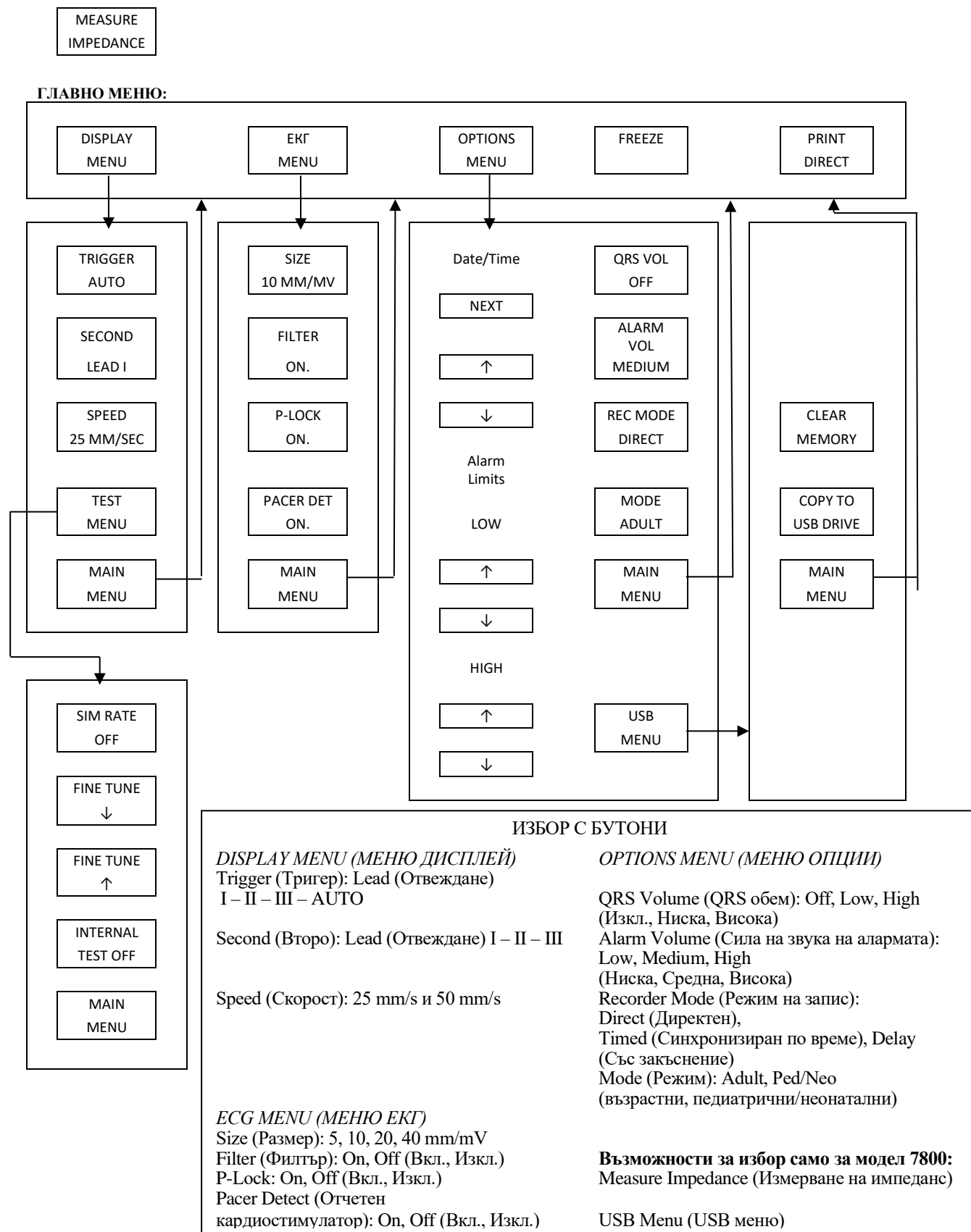

6.10 Заден панел

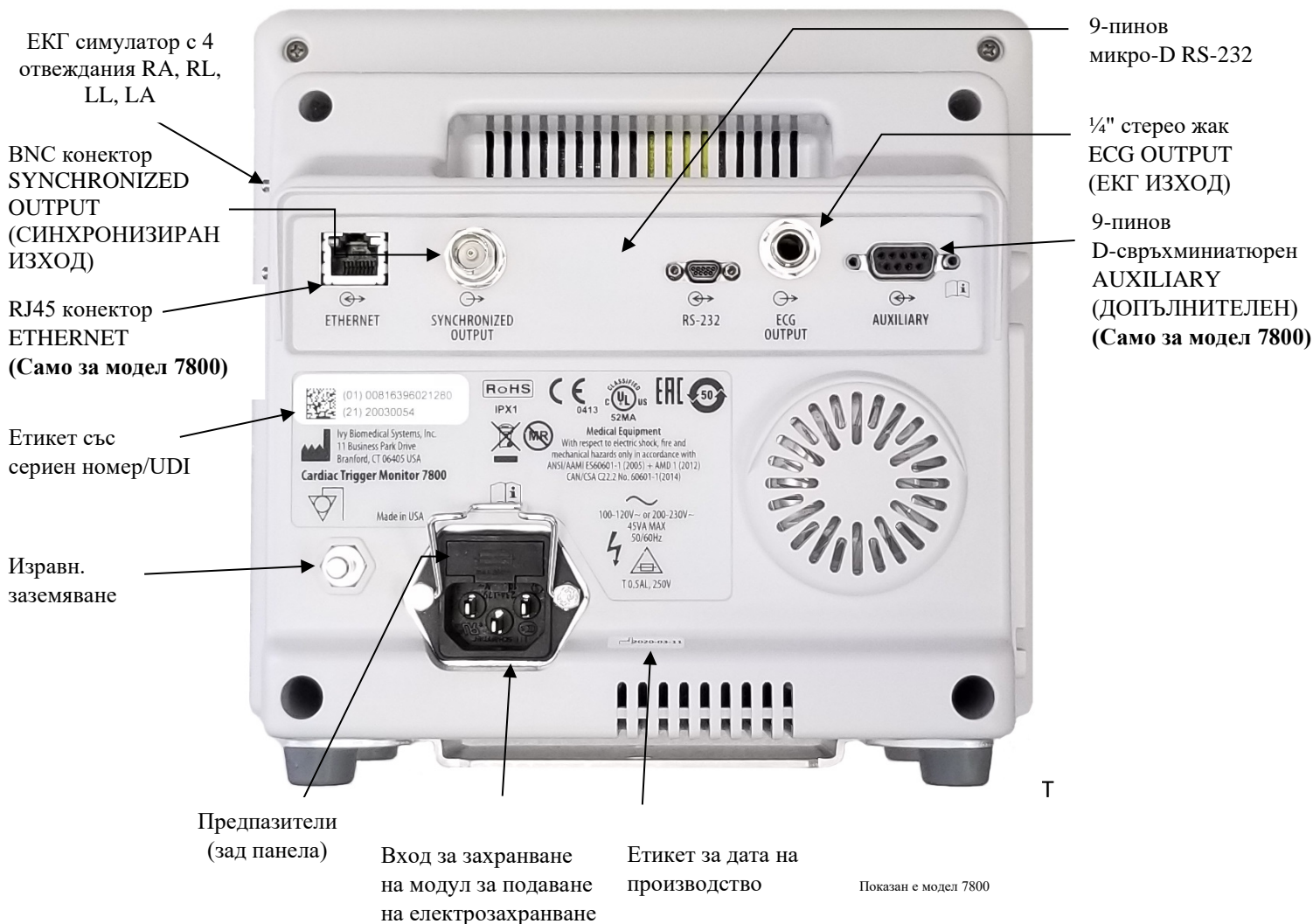

6.11 Характеристики на предпазителите

Предпазителите се намират зад капака на модула за подаване на електрозахранване. За да смените предпазителите, изключете от контакта захранващия кабел за променлив ток. Свалете капака на модула за подаване на електрозахранване и сменете предпазителя(ите) само с предпазители от същия тип и със същата номинална мощност: T 0,5 AL, 250 V.

ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА

6.12 Описание на задния панел

На задния панел е разположено следното:

ВХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ: Гнездо за стандартен захранващ кабел за променлив ток.



ВНИМАНИЕ: Когато мониторът е свързан към друго оборудване, винаги проверявайте дали всяко от свързаните устройства има свое собствено отделно заземяване.

Не се опитвайте да свързвате кабели към тези конектори, без да сте се свързали с вашия инженерен отдел на Biomedical. Това е с цел да се гарантира, че свързването отговаря на изискванията за ток на утечка на един от следните действащи стандарти: ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:08 и CE-MDD 93/42/EEC. Максималното допустимо неувреждащо напрежение, което може да се подаде към тези конектори, е 5 V.

СИНХРОНИЗИРАН ИЗХОД: BNC конектор с изходен импулс, синхронизиран с пика на R-зъбеца. Амплитудата на синхронизиращия импулс е фабрично конфигурируема: от 0 до +5 V, от +5 V до 0 V, от -10 V до +10 V или от +10 V до -10 V. Възможна ширина на синхронизиращия импулс: 1 ms, 50 ms, 100 ms и 150 ms.

ЗАЗЕМЯВАНЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА: Изравняване на потенциала - Заземяване, което може да се използва, за да се гарантира, че не могат да се настъпят потенциални разлики между това устройство и друго електрическо оборудване.

ПРЕДПАЗИТЕЛ: Подменяйте само с предпазители от същия тип и със същата номинална мощност, които са посочени върху етикета с данни за предпазителя. T 0,5 AL, 250 V.

ЕКГ ИЗХОД: Това е ¼-инчов стерео жак с аналогов изход за ЕКГ крива на крайника, изход за синхронизиран импулс на пръстена и стандартна обвивка. Ограничение до 100 Hz ширина на честотната лента.

RS-232: Електрически изолиран RS-232 микро-D конектор за комуникация на устройството. Конекторът RS-232 подава 6 V и -6 V с максимален ток 20 mA.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН (Само за модел 7800): 9-пинов D-свърхминиатюрен конектор, който осигурява специализиран интерфейс за специфични инсталации. Допълнителният изход подава +5 V и -12 V при максимален ток 12 mA.

ETHERNET (Само за модел 7800): Това е двуканален Ethernet изход, който предоставя Ethernet протокол (10Base-T, IEEE 802.3) от единичен RJ45 конектор. Първият канал свързва модел 7800 и конзолата на КТ скенера, за да се споделят данни и опции за управление. Втори Ethernet канал от същия конектор подава ЕКГ данни към дисплея на гентри отвора на КТ.

ЕТИКЕТ СЪС СЕРИЕН НОМЕР/UDI: Етикетът със сериен номер/UDI предоставя уникален идентификатор и сериен номер на продукта в четима от човек и машина форма (баркод).

ЕТИКЕТ ЗА ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Етикетът за дата на производство показва датата на производство на монитора. Датата на производство се кодира, като се използва формат ГГГГ-ММ-ДД.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на ДОПЪЛНИТЕЛНО оборудване, което не отговаря на еквивалентните изисквания за безопасност на това оборудване, може да доведе до намалено ниво на безопасност на крайната система. Съображенията, свързани с избора на аксесоари, трябва да включват:

- Употребата на аксесоар В БЛИЗОСТ ДО ПАЦИЕНТА.
- Доказателство, че сертифицирането за безопасност на дадения АКСЕСОАР е извършено в съответствие с действащия хармонизиран национален стандарт IEC 60601-1 и/или IEC 60601-1-1.

7.0 НАСТРОЙКА НА МОНИТОРА

7.1 Инсталиране на монитора

 **ВНИМАНИЕ:** Underwriters Laboratory (UL) все още не е тествала/одобрила модел 7600/7800 със стойка с колелца (Ivy REF: 590441) като цялостна система.

1. Сглобете стойката с колелца (Ivy REF: 590441), като спазвате Указанията за сглобяване на олекотена стойка с колелца GCX (DU-RS-0025-02).
2. Подравнете монитора и неговата свързваща пластина с монтажния адаптер на стойката с колелца (Фиг.1).



Фиг. 1




Фиг. 2


3. Издърпайте надолу застопоряващия щифт и плъзнете монитора върху монтажния адаптер на стойката с колелца (Фиг. 2). Освободете застопоряващия щифт и се уверете, че той е зацепен в плочката на адаптера на монитора. (Плочката на адаптера има отвор, чрез който застопоряващият щифт може да фиксира монитора.)
4. Затегнете двата пластмасови винта в монтажния адаптер на стойката с колелца, като ги завъртите по посока на часовниковата стрелка.

7.2 Настройване на инструмента за работа

1. Включете в монитора единия край на предоставения подвижен захранващ кабел, подходящ за употреба в болнични заведения. Включете другия му край в източник на променлив ток (100 – 120 V~ или 200 – 230 V~).

 **ВНИМАНИЕ:** Надеждно заземяване може да бъде осигурено само когато оборудването е свързано към еквивалентен контакт, обозначен със „За употреба в болнични заведения“.





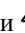





2. Натиснете превключвателя **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим) в лявата страна на предния панел, за да включите захранването.
3. Свържете магистралния кабел за ЕКГ с конектора за ЕКГ на страничния панел.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изберете внимателно местата на преминаване на кабелите на монитора (магистрални кабели за ЕКГ, захранващи кабели и т.н.), за да намалите възможността от спъване в тях.

НАСТРОЙКА НА МОНИТОРА

7.3 Задаване на дата и час

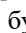Следвайте процедурата по-долу, за да зададете датата и часа. Часът се изписва в горния десен ъгъл на дисплея.

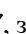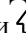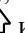1. Натиснете сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) в главното меню.
2. Натиснете сензорните бутони  и  под DATE/TIME (ДАТА/ЧАС), за да изберете MONTH (МЕСЕЦ).
3. Натиснете [NEXT -->] (НАПРЕД), за да преминете към настройката на DAY (ДЕН). Използвайте сензорните бутони  и , за да увеличите или намалите цифрата на деня.
4. Натиснете [NEXT -->] (НАПРЕД), за да преминете към настройката на YEAR (ГОДИНА). Използвайте сензорните бутони  и , за да увеличите или намалите цифрата на годината.
5. Натиснете [NEXT -->] (НАПРЕД), за да преминете към настройката на HOUR (ЧАС). Използвайте сензорните бутони  и , за да увеличите или намалите цифрата на часа.
6. Натиснете [NEXT -->] (НАПРЕД), за да преминете към настройката на MINUTE (МИНУТА). Използвайте сензорните бутони  и , за да увеличите или намалите цифрата на минутите.





7.4 Задаване на QRS и сила на звука на аларма

Следвайте процедурата по-долу, за да зададете QRS и силата на звука на алармата.

1. Натиснете сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) в главното меню.
2. Натиснете сензорния бутон [QRS VOL] (QRS ОБЕМ.), за да изберете QRS Volume (QRS обем). Възможностите за избор са OFF, LOW или HIGH (ИЗКЛ., НИСКА или ВИСОКА).
3. Натиснете сензорния бутон [ALARM VOL] (СИЛА НА ЗВУК НА АЛАРМА), за да изберете Alarm Volume (Сила на звука на аларма). Възможностите за избор са: LOW, MEDIUM, или HIGH (НИСКО, СРЕДНО или ВИСОКО).

След като сте настроили правилно датата, часовника и звука, натиснете [MAIN MENU (ГЛАВНО МЕНЮ)], за да се върнете на главния екран на монитора.

7.5 Задаване на граници на аларма

1. Натиснете сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) в главното меню.
2. Натиснете сензорните бутони за HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)  и  под ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА), за да изберете граници на HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА). Възможностите за избор са от 10 BPM (удара в минута) до 245 BPM през стъпки от 5 BPM.
3. Натиснете сензорните бутони за HR HIGH (ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)  и  под ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА), за да изберете граници на HR HIGH (ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА). Възможностите за избор са от 15 BPM (удара в минута) до 250 BPM през стъпки от 5 BPM.

7.6 Задаване на скорост на кривата

1. Натиснете сензорния бутон [DISPLAY MENU] (МЕНЮ ДИСПЛЕЙ) в главното меню.
2. Натиснете сензорния бутон [SPEED] (СКОРОСТ), за да изберете скоростта на кривата. Възможностите за избор са 25 и 50 mm/s.

 **ВНИМАНИЕ:** Сензорният бутон [SPEED] (СКОРОСТ) променя и скоростта на записващото устройство.

7.7 Настройки по подразбиране

За да върнете монитора към настройките по подразбиране, го изключете, като натиснете превключвателя **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим); след това включете монитора, като натиснете отново превключвателя **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим).

Настройка	Първоначална настройка по подразбиране
Настройка на език	Английски език (зависи от конфигурацията)
Размер на ЕКГ	10 mm/mV
Отвеждане на тригер	II или Авто (зависи от конфигурацията)
Второ отвеждане	I
Филтър	ВКЛ.
Праг на импеданса	50 k Ω (зависи от конфигурацията)
Долна граница на сърдечната честота	30
Горна граница на сърдечната честота	120
Скорост на кривата	25 mm/sec
Записващо устройство	Директно
QRS обем	Изкл.
Сила на звука на аларма	Средно
Вътрешен тест	Изкл.
Честота на симулатора	Изкл.
Аларми	30 секунди или изкл. (зависи от конфигурацията)
Полярност на тригера	Положителна или отрицателна (зависи от конфигурацията)
P-Lock	Вкл. или Изкл. (зависи от конфигурацията)
Отчитане на кардиостимулатор	Вкл. или Изкл. (зависи от конфигурацията)


Настройките по подразбиране/запамените настройки могат да бъдат персонализирани (необходима е парола) от отговорна организация. За повече информация за начина на активиране на тази функция се свържете с Ivy Biomedical Systems на тел.: +1 203.481.4183.

8.0 СИНХРОНИЗИРАН ИЗХОД (Тригер)

8.1 Синхронизиращ импулс

Синхронизираният ЕКГ изход създава задействащ импулс, като започва от пика на всеки R-зъбец, който се извежда на BNC конектора на **SYNCHRONIZED OUTPUT** (СИНХРОНИЗИРАН ИЗХОД) и на конектора на **ECG OUTPUT** (ЕКГ ИЗХОД) (пръстен на ¼" стерео жак) на задния панел на монитора. Свържете синхронизирания изход от монитора към устройството, което се синхронизира.

По-долу е показано синхронизирането на тригер импулса спрямо ЕКГ кривата.

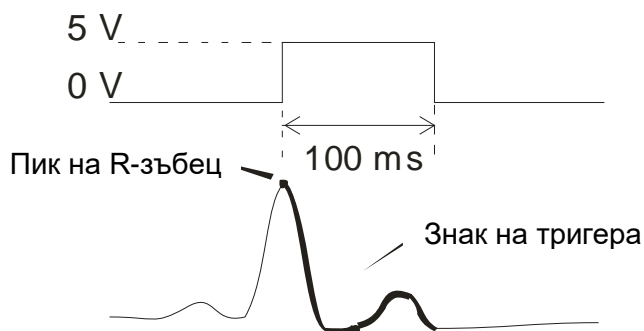

8.2 Знак на тригера

Синхронизираният изход на тригера е винаги активен. Част от ЕКГ кривата, съответстваща на синхронизирането на синхронизиращия импулс, е открояна в червено.

Ако функционирането на тригера изглежда хаотично, проверете следното:

- Изберете отвеждане с най-голямата амплитуда, обикновено Lead II, или изберете AUTO.
- Правилното поставяне на ЕКГ електродите. Възможно е да се наложи преместване на ЕКГ електродите.
- По ЕКГ електродите е останал влажен контактен гел.

8.3 Блокировка на полярността (P-LOCK)

При ЕКГ на някои пациенти формата на висока Т-вълна или дълбок S-зъбец понякога съвпада с критериите, използвани за откриване на R-зъбец. При настъпването на такава ситуация мониторът правилно открива R-зъбеца, а след това погрешно открива Т-вълната или S-зъбеца, което води до двойно задействане. Алгоритъмът за контрол на полярността (P-Lock) намалява броя на погрешните задействания при възникване на високи Т-вълни или дълбоки S-зъбци. Алгоритъмът на P-Lock позволява на модел 7600/7800 да открие и да се задейства само при пика на R-зъбеца, отхвърляйки по-голямата част от високите Т-вълни и дълбоки S-зъбци, които може да са причинили погрешно задействане.

За да включите/изключите P-Lock, извършете следните действия:

1. Натиснете сензорния бутон [ECG MENU] (МЕНЮ ЕКГ) в главното меню.
2. Натиснете сензорния бутон [P-LOCK], за да изберете P-LOCK. Възможностите за избор са ON (ВКЛ.) и OFF (ИЗКЛ.).

9.0 МОНИТОРИНГ НА ЕКГ

Двойни едновременни ЕКГ криви се движат на екрана в посока отляво надясно. Горната крива (Тригер) се използва за кардиосинхронизация. Долната крива (Втора) се използва само за визуализация. Избраните отвеждания се показват от дясната страна на съответните им криви. Сърдечната честота и границите на алармата за сърдечна честота се показват в горната част на екрана. Индикациите за аларми се появяват в центъра на екрана и премигват на всяка секунда. Символът „сърце“ премигва всеки път, когато бъде регистриран удар на сърцето.

9.1 Съображения за безопасност




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този монитор е снабден със защитени проводници на отвежданията. Не използвайте кабели и отвеждания с незащитени проводници на отвеждания, чиито проводници са оголени в края на кабела. Незащитените проводници на отвеждания и кабели могат да доведат до ненужен риск от възникване на неблагоприятни последици за здравето или смърт.



ВНИМАНИЕ: ЕКГ електродите са предназначени само за еднократна употреба. Не се опитвайте да ги използвате повторно.



ВНИМАНИЕ: ЕКГ връзките към пациента са с електроизолация **Тип CF** . За ЕКГ връзки използвайте изолирани клеми. Не допускайте връзките към пациента да влязат в контакт с други проводими части, в това число и със заземяващия кабел. Вижте инструкциите за свързване на пациента в това ръководство.



ВНИМАНИЕ: Токът на утечка е вътрешно ограничен от монитора до по-малко от 10 μ A. Винаги обаче трябва да отчетите сумарния ток на утечка, който може да бъде предизвикан от друго оборудване, използвано върху пациента едновременно с този монитор.



ВНИМАНИЕ: Моделът 7600/7800 е съвместим с уреди за високочестотна електрохирургия. Работните части на оборудването могат да се използват с уреди за високочестотна електрохирургия и са снабдени със защита от изгаряне на пациента. За да избегнете потенциални електрохирургически изгаряния на местата за мониторинг на ЕКГ, се уверете в правилното свързване на електрохирургическата обратна верига съгласно указанията на производителя. Ако тя е свързана неправилно, някои електрохирургически елементи може да допуснат обратно преминаване на електроенергия през електродите.



ВНИМАНИЕ: Импулсните шумове на устройството за контрол на изолацията могат да наподобят действителни сърдечни криви и по този начин да предотвратят задействането на аларми за сърдечната честота. За да сведете този проблем до минимум, се уверете в правилното поставяне на електродите и разполагане на кабелите.

9.2 Свързване към пациента

За да гарантирате спазването на спецификациите за безопасност и работни показатели, използвайте магистралните кабели за ЕКГ, предоставени от Ivy Biomedical Systems (вижте „Акcesoари“). Има вероятност други кабели да не дадат надеждни резултати.

Използвайте само висококачествени сребърни/сребърно-хлоридни ЕКГ електроди или техни еквиваленти. За най-добри ЕКГ резултати използвайте ЕКГ електроди, предоставени от Ivy Biomedical Systems (вижте „Акcesoари“).


Следвайте процедурата по-долу, за да извършите мониторинг на ЕКГ:

1. Подгответе всяко от местата за поставяне на електрод и поставете електродите.
2. Свържете магистралния кабел за ЕКГ с 4 отвеждания към **ECG** (ЕКГ) входа на монитора.
3. Свържете отвежданията с магистралния кабел за ЕКГ.
4. Свържете отвежданията към електродите, както е показано по-долу.

Сравнителна таблица с цветовете маркировка за отвеждания към пациента:

Вид отвеждане	Цветова маркировка за САЩ (АНА)	Цветова маркировка за ЕС (IEC)
RA (ДР) – дясна ръка	Бял	Червен
RL (ДК) – десен крак	Зелен	Черен
LL (ЛК) – ляв крак	Червен	Зелен
LA (ЛР) – лява ръка	Черен	Жълт

Препоръчително поставяне на отвеждания:

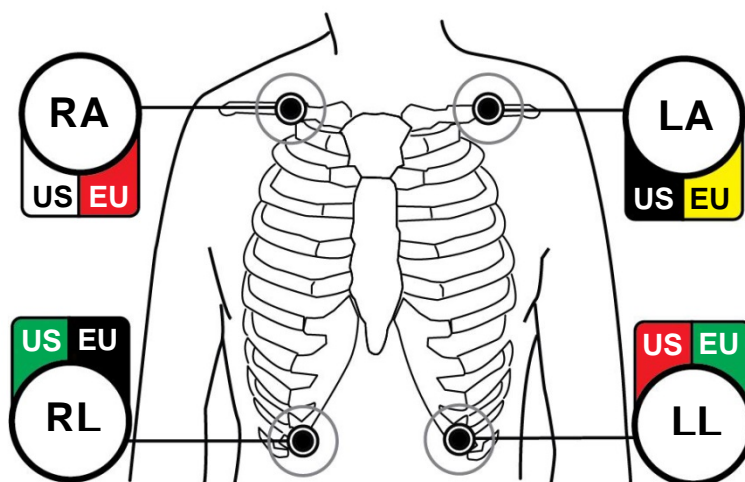

5. Използвайте процедурите, описани в следващите раздели, за задаване на граници на алармите, избор на отвеждане, регулиране на амплитуда и активиране или деактивиране на филтъра.

9.3 ЕКГ електроди

ЕКГ електродите варират по конструкция и качество при различните производители. Все пак обикновено има две основни групи: електроди за дългосрочен мониторинг и електроди за краткосрочен мониторинг. Ivu препоръчва да използвате електроди за краткосрочен мониторинг, които се стабилизират по-бързо, тъй като имат по-високо съдържание на хлорид. Моля, вижте раздела „Аксесоари“ в това ръководство за препоръчани от Ivu ЕКГ електроди.

Ivu препоръчва, преди да поставите ЕКГ електродите върху кожата на пациента, да подготвите мястото на тяхното поставяне, като разтриете кожата със сух марлен тампон или подготвящ гел, като например Nuprep (Ivu REF: 590291). Може да се наложи да отстраните крем или пудра от кожата на пациента, за което като алтернатива можете да използвате топла сапунена вода.

9.4 Измерване на импеданса (само за модел 7800)

Моделът 7800 притежава уникален хардуер и софтуер, който позволява измерване и показване на стойността на импеданса между кожата на пациента и всеки отделен ЕКГ електрод (RA (Дясна ръка), LA (Лява ръка), LL (Ляв крак) и RL (Десен крак)).


Целта на измерването на импеданса е да се потвърди правилната подготовка на кожата и правилното поставяне на ЕКГ електродите, както и да се гарантира добър ЕКГ сигнал и следователно надежден задействащ импулс. Ivu препоръчва стойността на импеданса за всяка ЕКГ връзка да бъде по-ниска от 50 000 Ω (50k Ω). Използването на неподходящ тип ЕКГ електроди, неправилното им поставяне или недостатъчната подготовка на кожата могат да повишат стойността на импеданса на електрода, което ще доведе до дисбаланс между отвежданията, което от своя страна може да предизвика поява на шум в ЕКГ сигнала и оттам да доведе до неточни задействащи импулси.

- Стойността на импеданса за всеки ЕКГ електрод може да бъде измерена, като се натисне сензорният бутон **Measure Impedance** (Измерване на импеданс) на екрана. Забележка: Мониторинг на ЕКГ не се извършва по време на измервания на импеданса. ЕКГ се възобновява в рамките на 8 секунди след натискане на сензорния бутон **Measure Impedance** (Измерване на импеданс).
- Стойността на импеданса се показва в горната лява част на дисплея.
- Стойности на импеданса, по-ниски от 50 k Ω , се показват в синьо.
- Ако стойността на импеданса за някой електрод надвиши 50 k Ω , стойността на съответното(ите) отвеждане(ия) ще премигва в червено, което показва, че стойността е извън препоръчвания диапазон.
- Ако измерванията са в червен цвят, свалете ЕКГ електродите и почистете кожата с марлен тампон или с подготвящ гел, като например Nuprep (Ivu REF: 590291), преди да поставите нов ЕКГ електрод.
- За правилна подготовка на кожата следвайте указанията, посочени върху опаковката на ЕКГ електрода.
- Измерете отново импеданса на кожата 1 – 2 минути след повторното поставяне на електродите върху кожата на пациента.

МОНИТОРИНГ НА ЕКГ

Сензорен
бутон за
измерване на
импеданс →


Стойности
за импеданс
в kΩ →

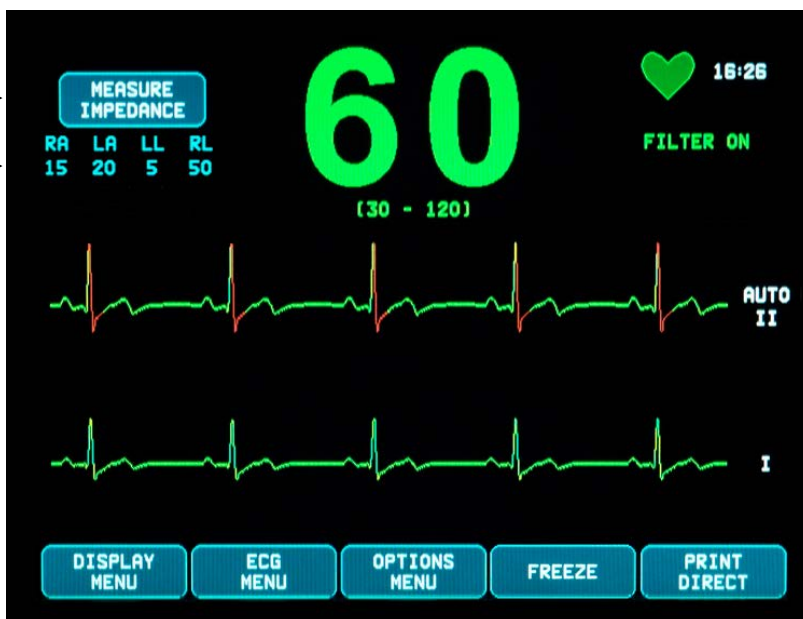

9.5 Амплитуда (размер) на ЕКГ кривата

Следвайте процедурата по-долу, за да настроите амплитудата (размера) на показаните ЕКГ криви.

1. Натиснете сензорния бутон [ECG MENU] (МЕНЮ ЕКГ) от главното меню. Появява се следното меню.
2. Натиснете първия програмируем сензорен бутон [SIZE] (РАЗМЕР), за да настроите амплитудата на ЕКГ кривата. Възможностите за избор са: 5, 10, 20 и 40 mm/mV.
3. Натиснете [MAIN MENU] (ГЛАВНО МЕНЮ), за да се върнете към главното меню.

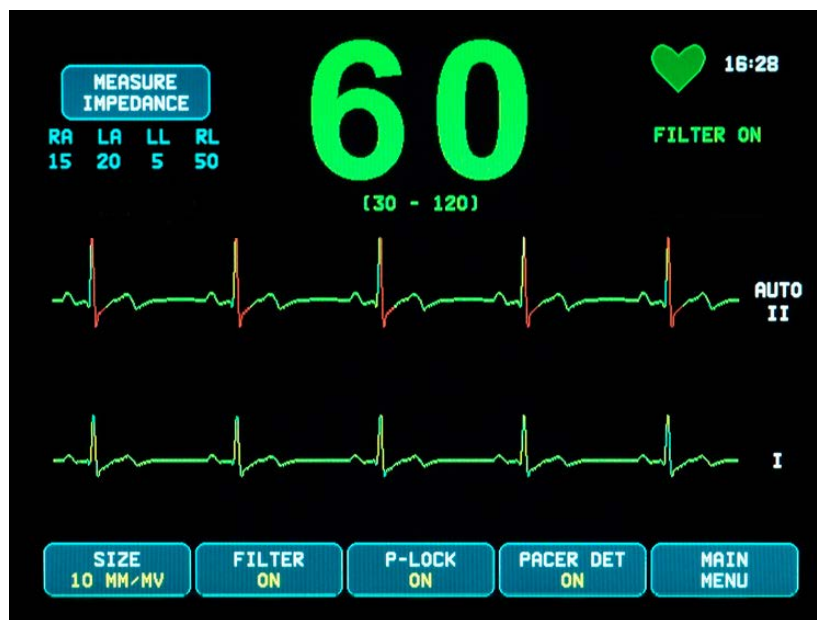

← Състояние на ЕКГ режекторен филтър

↑ Сензорен бутон ECG SIZE (РАЗМЕР НА ЕКГ)

↑ Сензорен бутон ECG NOTCH FILTER (ЕКГ РЕЖЕКТОРЕН ФИЛТЪР)

9.6 ЕКГ режекторен филтър

Следвайте процедурата по-долу, за да активирате ЕКГ режекторния филтър.


1. Натиснете сензорния бутон [ECG MENU] (МЕНЮ ЕКГ) от главното меню. Появява се горното меню.
2. Натиснете втория програмируем сензорен бутон [FILTER] (ФИЛТЪР), за да промените избора за ECG NOTCH FILTER (ЕКГ РЕЖЕКТОРЕН ФИЛТЪР). Изберете между FILTER ON (ФИЛТЪР ВКЛ.) и FILTER OFF (ФИЛТЪР ИЗКЛ.). Индикаторът за състояние на FILTER (ФИЛТЪР) се показва в горната дясна част на дисплея. Чрез FILTER (ФИЛТЪР) се задава честотната характеристика на показаната крива, както следва:
 - a. Филтрирано: 1,5 до 40 Hz или 3,0 до 25 Hz (зависи от конфигурацията)
 - b. Нефилтрирано: 0,67 до 100 Hz
3. Натиснете [MAIN MENU] (ГЛАВНО МЕНЮ), за да се върнете към главното меню.

9.7 Избор на отвеждане

Модел 7600/7800 включва функция за избор на отвеждане AUTO (само за отвеждане на тригер). Когато тази функция е избрана, тя ще определи кое отвеждане (I, II или III) осигурява ЕКГ сигнал с най-добро качество, а по този начин – по-надежден сърдечен тригер.

Следвайте процедурата по-долу, за да промените избора на отвеждане на ЕКГ вектора на тригер (горната ЕКГ крива) и втория ЕКГ вектор (долната ЕКГ крива).

1. Натиснете сензорния бутон [DISPLAY MENU] (МЕНЮ ДИСПЛЕЙ) от главното меню. Появява се следното меню.

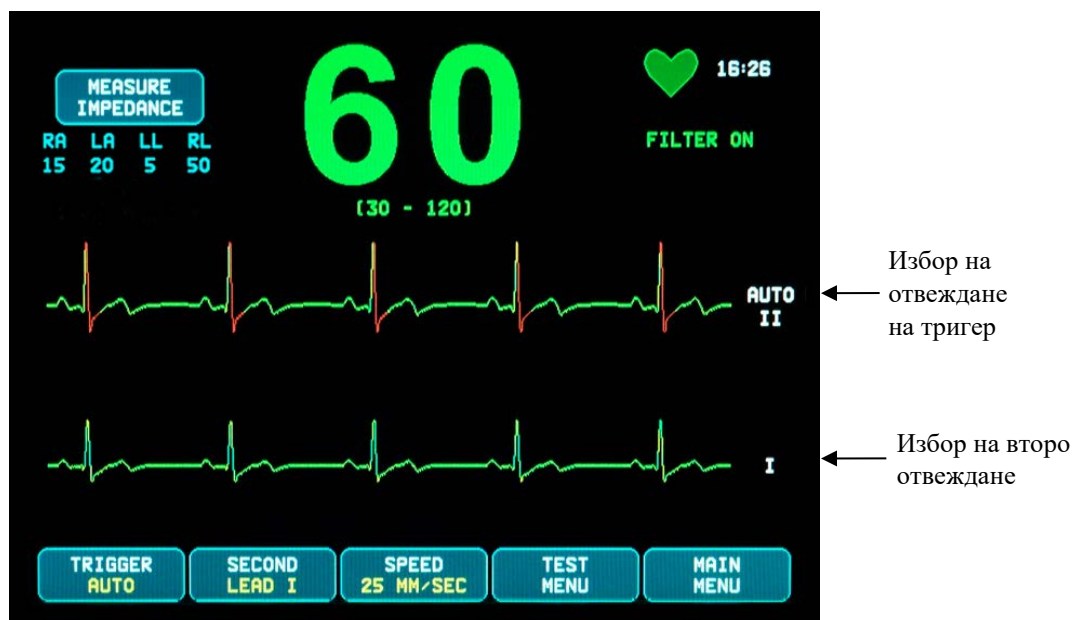

Сензорен бутон TRIGGER LEAD SELECT (ИЗБОР НА ОТВЕЖДАНЕ НА ТРИГЕР)

Сензорен бутон SECOND LEAD SELECT (ИЗБОР НА ВТОРО ОТВЕЖДАНЕ)

2. Натиснете първия програмируем сензорен бутон [TRIGGER] (ТРИГЕР), за да изберете желаното ЕКГ отвеждане за горната ЕКГ крива. Възможностите за избор са: Lead I, Lead II, Lead III и AUTO (Отвеждане I, Отвеждане II, Отвеждане III и АВТО). Избраното отвеждане ще се появи вдясно от горната ЕКГ крива.
3. Натиснете втория програмируем сензорен бутон [SECOND] (ВТОРО), за да изберете желаното ЕКГ отвеждане. Възможностите за избор са: Lead I, Lead II и Lead III. (Отвеждане I, Отвеждане II и Отвеждане III). Избраното отвеждане ще се появи вдясно от долната ЕКГ крива.
4. Натиснете [MAIN MENU] (ГЛАВНО МЕНЮ), за да се върнете към главното меню.

9.8 Съобщение за слаб сигнал

Ако амплитудата на ЕКГ сигнала е между 300 μV и 500 μV (3 – 5 mm амплитуда при размер 10 mm/mV) за период от осем секунди, ще се появи съобщение в жълт цвят „LOW SIGNAL“ (СЛАБ СИГНАЛ).

Ако функционирането на тригера изглежда хаотично, докато е показано съобщението, проверете следното:

- Изберете отвеждане TRIGGER (ТРИГЕР) с най-голямата амплитуда, обикновено Lead II (Отвеждане II) или AUTO (АВТО).
- Правилното поставяне на ЕКГ електродите. Възможно е да се наложи преместване на ЕКГ електродите.
- По ЕКГ електродите е останал влажен контактен гел.

9.9 Пейсмейкър

Следвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате функцията за откриване на пейсмейкър:

1. Натиснете сензорния бутон [ECG MENU] (МЕНЮ ЕКГ) от главното меню.
2. Натиснете сензорния бутон [PACER DET] (ОТЧ. КАРДИОСТИМУЛАТОР), за да превключите откриването на кардиостимулатор между ON (ВКЛ.) и OFF (ИЗКЛ.).
 - След откриването на пейсмейкър буква **P** започва да мига в символа „сърце“.
 - Ще се появи съобщение в червен цвят „PACER DETECT OFF“ (ОТЧЕТЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР ИЗКЛ.), ако веригата за откриване на кардиостимулатор не е активна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПАЦИЕНТИ С ПЕЙСМЕЙКЪР: Измервателните уреди на честотата могат да продължават да отчитат честотата от пейсмейкъра при спиране на сърцето или при някои аритмии. Не разчитайте изцяло на АЛАРМЕНИТЕ СИГНАЛИ на измервателния уред на честотата. ПАЦИЕНТИТЕ с пейсмейкър трябва да бъдат поставени под непосредствено наблюдение. Вижте раздел „СПЕЦИФИКАЦИИ“ в това ръководство, за да се запознаете с възможностите на този уред да филтрира импулсите от пейсмейкъра. Не е разгледано филтрирането на импулсите от последователен предсърдно-камерен пейсмейкър - не разчитайте на филтрирането на импулси от пейсмейкър при пациенти с двойнокамерни пейсмейкъри.

9.10 Граници на аларма

1. Натиснете сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) от главното меню. Показва се следното меню.
2. Използвайте програмируемите сензорни бутони със стрелки нагоре/надолу, за да зададете горната и долната граница на сърдечната честота.

↑ Увеличава границата HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)
HR LOW
(ДОЛНА ГРАНИЦА
НА СЪРДЕЧНАТА
ЧЕСТОТА)

↓ Намалява границата HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)


МОНИТОРИНГ НА ЕКГ

- ↑ Увеличава границата HR HIGH (ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)
HR HIGH
(ГОРНА ГРАНИЦА
НА СЪРДЕЧНАТА
ЧЕСТОТА)
- ↓ Намалява границата HR HIGH (ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА)

При всяко натискане на бутон съответната граница се променя с 5 BPM (удара в минута). Настоящите граници на сърдечната честота се показват в горната част на дисплея директно под стойността на сърдечната честота.

3. Натиснете [MAIN MENU] (ГЛАВНО МЕНЮ), за да се върнете към главното меню.

Вид аларма	Граница по подразбиране
Долна граница на сърдечна честота	30
Горна граница на сърдечна честота	120

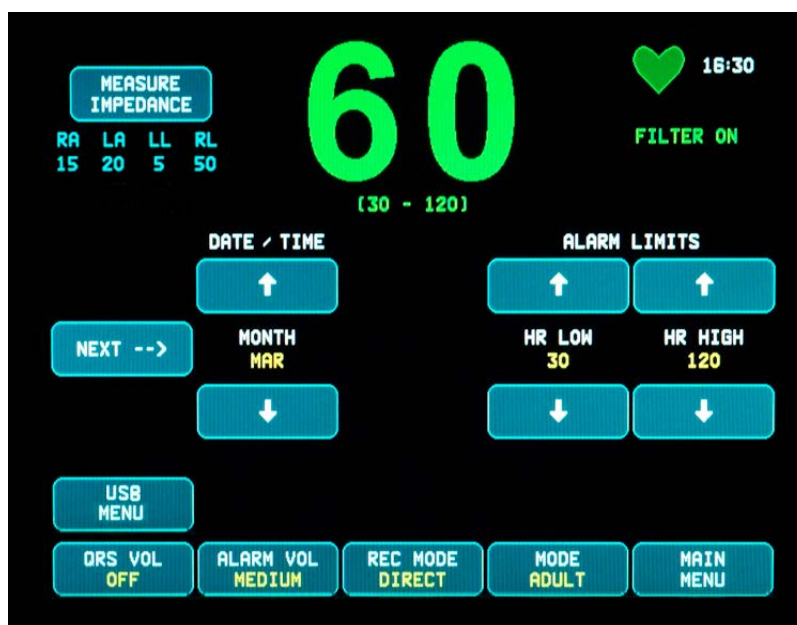

10.0 РАБОТА ПРИ СВЪРЗВАНЕ В СИСТЕМА


10.1 Съобщения за състояние на рентген (само за модел 7800)

Когато моделът 7800 е свързан към КТ скенер през ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ конектор на задния панел, мониторът може да запаметява ЕКГ данни и да ги прехвърля към USB външна памет.

Има три съобщения за състоянието на рентгена:

1. **XRAY ON (РЕНТГЕН ВКЛ.):** Рентгенът на КТ скенера е активен или е „ON“ (Вкл.). Моделът 7800 ще запаметява ЕКГ данните през този период.
2. **XRAY OFF (РЕНТГЕН ИЗКЛ.):** Рентгенът на КТ скенера е „OFF“ (Изкл.).
3. **XRAY DISCONNECT (ПРЕКЪСНАТ РЕНТГЕН):** Моделът 7800 и КТ скенерът НЕ са свързани правилно.
4. **STORING DATA (ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ДАННИ):** Извършва се запаметяване на ЕКГ данни.

Състояние на
рентген
STORING DATA
(ЗАПАМЕТЯВА
НЕ НА ДАННИ)

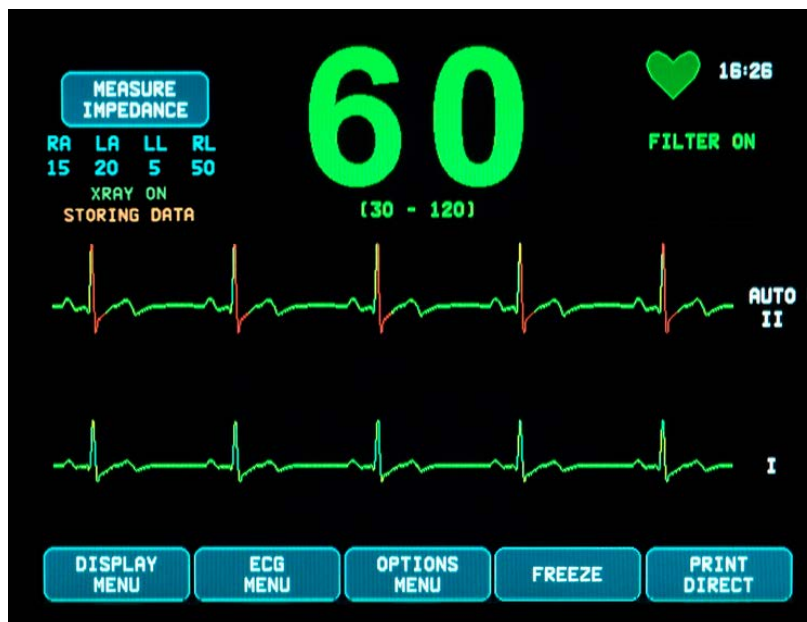

11.0 ЗАПАЗВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗА ЕКГ

11.1 Прехвърляне на данни за ЕКГ с помощта на USB порта (само за модел 7800)

Моделът 7800 е снабден с USB порт, който позволява на потребителя да свърже USB външна памет и да обработва до 200 ЕКГ събития и измервания на импеданс, запазени в монитора.

ЕКГ данни се запаметяват в паметта на монитора, когато сигналът на рентгена от КТ скенера стане активен. Запаметяването на ЕКГ данните спира 10 секунди, след като сигналът на рентгена прекъсне.


Запаметени ЕКГ данни (1 събитие):


10 секунди преди рентген, по време на рентген и 10 секунди след рентген


ЕКГ данните могат да бъдат изтеглени на външна памет (минимум 1 GB) чрез следната процедура:

1. Поставете USB външната памет в USB порта отстрани на монитора.
2. От сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) натиснете [USB MENU] (МЕНЮ USB).
3. Натиснете сензорния бутон [COPY TO USB DRIVE] (КОПИРАНЕ В USB У-ВО).
4. След като всички данни бъдат изтеглени във външната памет, натиснете [CLEAR MEMORY] (ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТ), за да изтриете ЕКГ данните от паметта на монитора, или натиснете MAIN MENU (ГЛАВНО МЕНЮ), за да се върнете към главното меню.

11.2 USB порт

 **ВНИМАНИЕ:** USB портът на модел 7800 се използва само за прехвърляне на вътрешни данни към външен носител с помощта на стандартен тип USB външна памет (флаш памет). Свързването на какъвто и да било друг вид USB устройство към този порт може да доведе до повреда на монитора.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** USB паметта, която се използва с този порт, **НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАХРАНВА ОТ ВЪНШЕН ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ.**

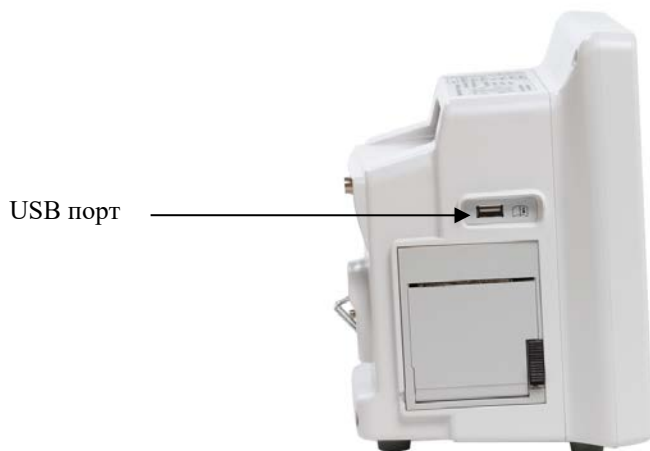


12.0 РАБОТА НА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО


12.1 Смяна на хартията

Сменете ролката с термохартия по следния начин. (Хартията за записващото устройство е Ivy REF: 590035)

1. Натиснете бутона за изваждане на хартията, за да отворите вратичката на предната страна на записващото устройство. Ако вратичката не се отвори напълно, дръпнете я към себе си, докато се отвори изцяло.

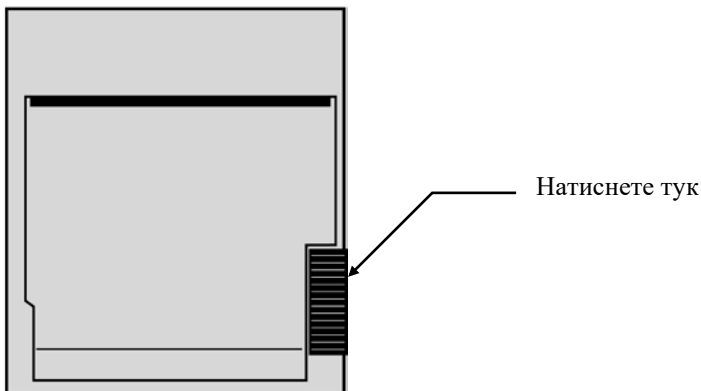

2. Хванете и премахнете празната ролка хартия, като я придърпате внимателно към себе си.
3. Поставете нова ролка хартия между двете кръгли уши на държача за хартия.
4. Издърпайте малко хартия от ролката. Уверете се, че чувствителната (лъскавата) страна на хартията е обърната към печатащата глава. Лъскавата страна на хартията обикновено е от вътрешната страна на ролката.
5. Подравнете хартията с притискащата ролка на вратата.

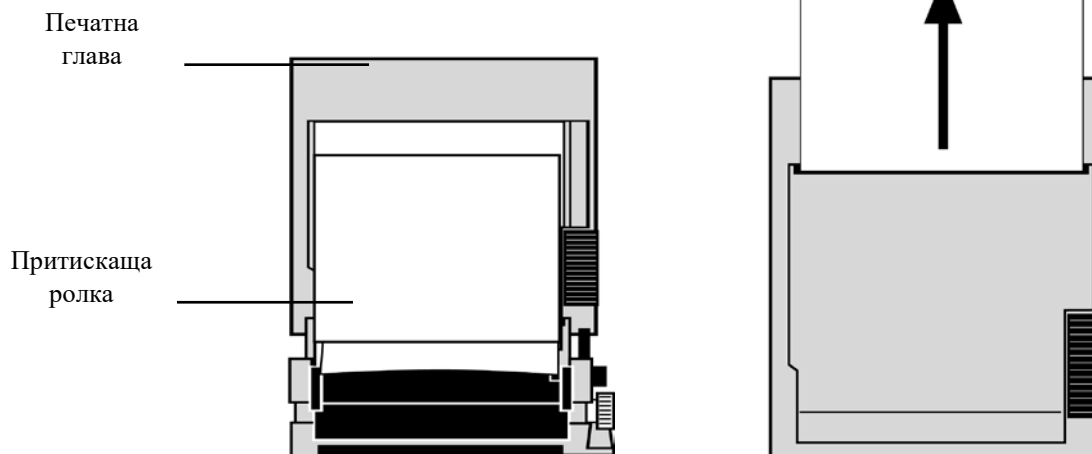


6. Придържайте хартията към притискащата ролка и затворете вратичката.

РАБОТА НА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО

12.2 Режими на работа на записващото устройство

Следвайте процедурата по-долу, за да изберете използвания режим на записващото устройство. Възможностите за избор са DIRECT (ДИРЕКТЕН), TIMED (СИНХРОНИЗИРАН ПО ВРЕМЕ), DELAY (СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ) и XRAY (РЕНТГЕН).

1. Натиснете сензорния бутон [OPTIONS MENU] (МЕНЮ ОПЦИИ) от главното меню.
2. Натиснете третия програмируем сензорен бутон [REC MODE] (РЕЖИМ ЗАПИС), за да изберете режима на записващото устройство.

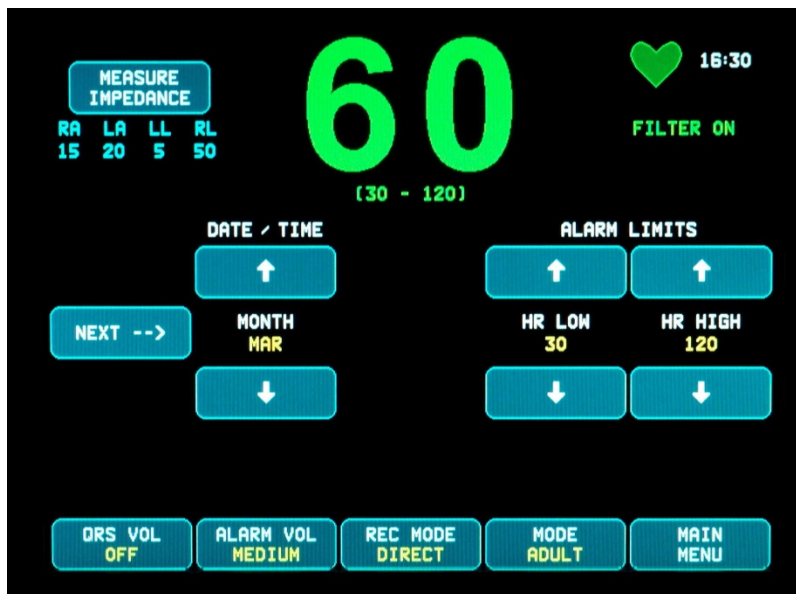

Избор на режим на записващото устройство

All Recorder Modes (Всички режими на записващото устройство) – За да печатате, натиснете бутона [PRINT] (ПЕЧАТ) в главното меню. Натиснете отново [PRINT] (ПЕЧАТ), за да спрете печатането.

Direct (Директен) – За да печатате в DIRECT (ДИРЕКТЕН) режим на записващото устройство, натиснете бутона [PRINT] (ПЕЧАТ) в главното меню. Натиснете отново [PRINT] (ПЕЧАТ), за да спрете печатането.

Графиката съдържа настройките на параметрите и час/дата.

Скоростта на печат на графиката и вертикалната разделителна способност са еднакви с тези на дисплея. Графиката е обозначена със скоростта на графиката в mm/s, режимът на записващото устройство и параметрите.

Timed (Синхронизиран по време) – Режимът TIMED (СИНХРОНИЗИРАН ПО ВРЕМЕ) стартира при натискане на бутона PRINT (ПЕЧАТ) и печата в продължение на 30 секунди.

РАБОТА НА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО

Delay (Със закъснение) – Режимът Delay (Със закъснение) автоматично разпечатва 30 или 40 секунди от ЕКГ кривата след възникването на състояние на аларма в зависимост от избраната скорост:

15 секунди преди и 15 секунди след при скорост 50 mm/s
20 секунди преди и 20 секунди след при скорост 25 mm/s

XRAY (само за модел 7800) – Режимът Xray (Рентген) автоматично печата 20 секунди от ЕКГ кривата след поява на рентгенов лъч:

10 секунди преди и 10 секунди след поява на рентгенов лъч

12.3 Скорост на записващото устройство


Следвайте процедурата по-долу, за да промените скоростта на записващото устройство.

Натиснете сензорния бутон [SPEED] (СКОРОСТ) в [DISPLAY MENU] (МЕНЮ ДИСПЛЕЙ), за да изберете скоростта на записващото устройство. Възможностите за избор са 25 и 50 mm/s.


ЗАБЕЛЕЖКА: Сензорният бутон [SPEED] (СКОРОСТ) променя и скоростта на ЕКГ кривата.

12.4 Пробни разпечатки

Режим DIRECT (Директен):

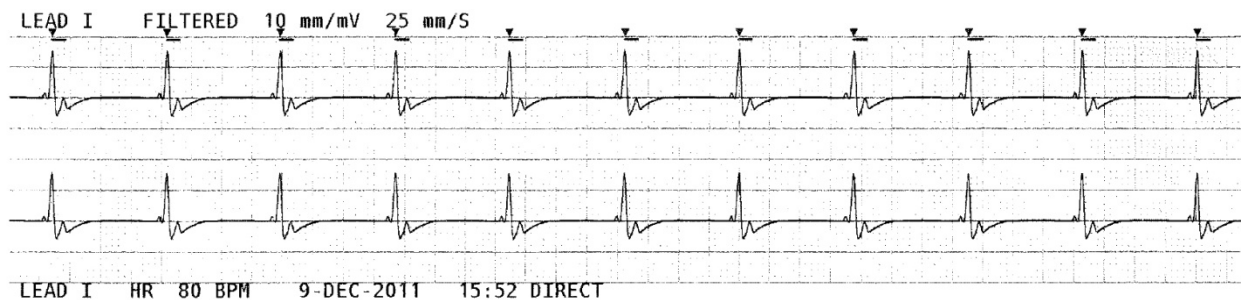

Режим XRAY (Рентген) (само за модел 7800):

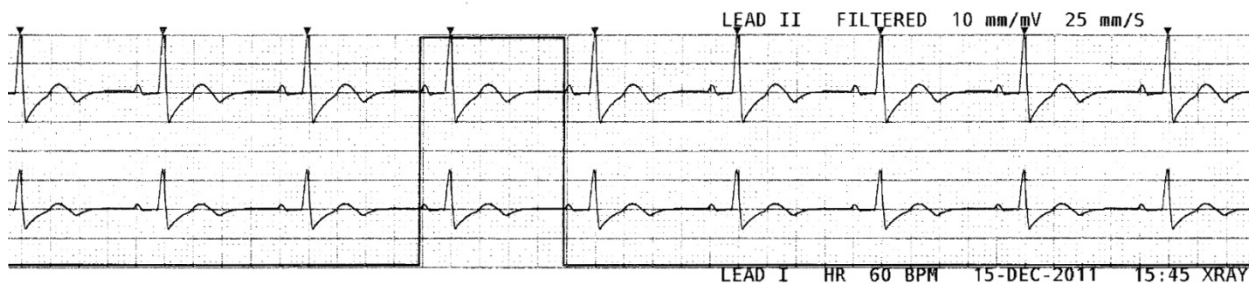

13.0 СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМИ

13.1 Напомнящи сигнали



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звуковите аларми се поставят на пауза за 30 секунди, докато мониторът загрява.

Забележка: По заявка се предлагат и други опции.

Следните съобщения са **НАПОМНЯЩИ СИГНАЛИ**, които се появяват в горния ляв ъгъл на дисплея на монитора. Напомнящите съобщения се изобразяват на екрана с бели букви върху червен фон.

PAUSE (ПАУЗА): Показва времето (в секунди), преди да се включат звуковите аларми.

ALARM MUTE


(ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА



НА АЛАРМАТА):

Звуковите аларми са изключени.



Забележка: ALARM MUTE (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА НА АЛАРМАТА)

е еквивалент на AUDIO OFF (ИЗКЛЮЧЕН ЗВУК).

Бутонът за изключване на звука на алармата  позволява на потребителя да превключва между спиране на звуковите аларми за 120 секунди и активиране на звуковите аларми:

1. За да поставите на пауза звуковите аларми за 120 секунди, натиснете еднократно за кратко бутона .
Забележка: Аларменото съобщение **PAUSE (ПАУЗА)** ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея.
2. За да активирате отново звуковите аларми, натиснете еднократно за кратко бутона .

Бутонът за изключване на звука на алармата  също така позволява на потребителя да дезактивира звуковите аларми:

1. За да дезактивирате звуковите аларми, натиснете и задръжте бутона  в продължение на три секунди.
Забележка: Напомнящият сигнал **ALARM MUTE (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА НА АЛАРМАТА)** ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея.
2. За да активирате отново звуковите аларми, натиснете еднократно за кратко бутона .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички аларми се считат за **ВИСОКОПРИОРИТЕТНИ** и изискват незабавно внимание.

13.2 Аларми за пациент

Следните съобщения са АЛАРМИ ЗА ПАЦИЕНТ, които се появяват на дисплея на монитора точно под сърдечната честота. Белите букви върху червен фон премигват веднъж в секунда и се съпровождат от звуков алармен сигнал.

HR HIGH (ГОРНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА): Границата за аларма при висока сърдечна честота е превишена в продължение на три секунди.

HR LOW (ДОЛНА ГРАНИЦА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА): Границата за аларма при ниска сърдечна честота е превишена в продължение на три секунди.

ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ): Интервалът между ударите на сърцето е превишил шест секунди.

13.3 Технически аларми

Следните съобщения са ТЕХНИЧЕСКИ АЛАРМИ, които се появяват на дисплея на монитора точно под сърдечната честота. Белите букви върху червен фон премигват веднъж в секунда и се съпровождат от звуков алармен сигнал.

LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.): Отвеждане се е отделило. Аларменото съобщение LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) ще се появи 1 секунда след установяването на грешката.

CHECK LEAD (ПРОВЕРКА НА ОТВЕЖДЕНИЯТА): Установен е дисбаланс между отвежданията. Аларменото съобщение CHECK LEAD (ПРОВЕРКА НА ОТВЕЖДЕНИЯТА) ще се появи 1 секунда след установяването на грешката.

SYSTEM ERROR (СИСТЕМНА ГРЕШКА): Открита е неизправност в монитора. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

13.4 Информационни съобщения

Съобщение за слаб сигнал

Ако амплитудата на ЕКГ сигнала е между 300 μV и 500 μV (от 3 mm до 5 mm при размер от 10 mm/mV) в продължение на осем секунди, съобщението „LOW SIGNAL“ (СЛАБ СИГНАЛ) се изобразява на екрана в жълто под кривата на ЕКГ (вж. раздела за мониторинг на ЕКГ).

Съобщение за откриване на пейсмейкър

Съобщението „PACER DETECT OFF“ (ОТЧЕТЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР ИЗКЛ.) се появява в червено, ако веригата за откриване на кардиостимулатор е изключена от менюто за ЕКГ.

Съобщение за проверка на електрода (само за модел 7800)

Съобщението „CHECK ELECTRODE“ (ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОДА) се изобразява на екрана в жълто, в случай че стойността на импеданса за някой електрод надвиши 50 k Ω . Стойността на съответното(ите) отвеждане(ия) ще премигва в червено, което показва, че стойността е извън препоръчвания диапазон.

14.0 ТЕСТВАНЕ НА МОНИТОРА




ВНИМАНИЕ: При нормална работа не е необходимо вътрешно регулиране или калибриране. Тестовите за безопасност трябва да се провеждат само от квалифициран персонал. Проверките за безопасност трябва да се провеждат редовно или в съответствие с местните или държавните разпоредби. В случай че е необходимо сервизно обслужване, свържете се с квалифициран сервизен персонал.

14.1 Вътрешен тест

Включете монитора, като натиснете бутона **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим) на предния панел. Трябва да чуете три звукови сигнала. Натиснете сензорния бутон DISPLAY MENU (МЕНЮ ДИСПЛЕЙ) от главното меню. След това натиснете сензорния бутон TEST MENU (МЕНЮ ЗА ТЕСТОВЕ). Натиснете сензорния бутон INTERNAL TEST (ВЪТРЕШЕН ТЕСТ). Възможностите за избор са ON (ВКЛ.) и OFF (ИЗКЛ.). Когато функцията INTERNAL TEST (ВЪТРЕШЕН ТЕСТ) е включена, тя генерира импулс от 1 mV при 70 BPM (удара в минута), при което на дисплея се показва крива и показание за 70 уд./мин и се подава сигнал към стерео жака и BNC конектора на задния панел. ВЪТРЕШНИЯТ ТЕСТ проверява вътрешните функции на монитора. INTERNAL TEST (ВЪТРЕШЕН ТЕСТ) трябва да се извършва всеки път, преди да се наблюдава пациент. Ако следните показания не са налице, се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

За тестване на визуалните и звуковите аларми:



Ако алармите са поставени на пауза или с изключен звук, натиснете бутона , за да ги включите. Изключете магистралния кабел за ЕКГ. Проверете дали съобщението LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) е показано на екрана и дали звуковата аларма е включена. При INTERNAL TEST ON (ВЪТРЕШЕН ТЕСТ ВКЛЮЧЕН) проверете дали се изпълнява следното: 1) Съобщението LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) изчезва и 2) Мониторът започва да брои QRS.

14.2 Симулатор на ЕКГ

Модел 7600/7800 разполага с вграден симулатор на ЕКГ, с който се проверява изправността на магистралния кабел за ЕКГ, проводниците на отвежданията и електронните схеми, използвани при обработка на ЕКГ сигнала.



ВНИМАНИЕ: Магистралният кабел за ЕКГ и проводниците на отвежданията се считат за консумативи, които периодично трябва да се сменят. За да се предотвратят смущения в наблюдението на пациента, препоръчително е винаги да има на разположение резервен комплект.



ВНИМАНИЕ: Тестването на симулатора на ЕКГ трябва да се провежда преди всеки мониторинг на пациент. Ако показанията по-долу не са налице, се обърнете към квалифициран сервизен персонал.


Включете монитора, като натиснете бутона **Power On/Standby** (Включване/Стендбай режим) на предния панел. Трябва да чуете три звукови сигнала. Включете магистралния кабел за ЕКГ в гнездото. Свържете четирите проводника на отвежданията към терминалите на симулатора, намиращи се на панела от дясната страна на монитора. Клемите имат четири етикета с цвятова маркировка за лесно разпознаване. Симулаторът генерира ЕКГ крива и сърдечна честота в диапазона от 10 до 250 уд./мин (по избор на потребителя).

14.3 Работа със симулатора на ЕКГ

За да включите симулатора и да настроите сърдечната честота, следвайте процедурата по-долу:


1. Натиснете сензорния бутон DISPLAY MENU (МЕНЮ ДИСПЛЕЙ) от главното меню. След това натиснете сензорния бутон [TEST MENU] (МЕНЮ ЗА ТЕСТОВЕ).
2. Натиснете сензорния бутон SIM RATE (СИМ. ЧЕСТОТА), за да включите симулатора и да превключвате между опциите за сърдечна честота.
3. Натискайте бутоните \uparrow FINE TUNE \downarrow (ФИНА НАСТРОЙКА), за да промените сърдечната честота на стъпки от едно.
4. Проверете дали показаната на екрана сърдечна честота е равна на избраната честота на симулатора. Проверете дали две ЕКГ криви са показани на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: При включен симулатор съобщението „SIMULATOR ON“ (ВКЛЮЧЕН СИМУЛАТОР) се изобразява в жълто на екрана.

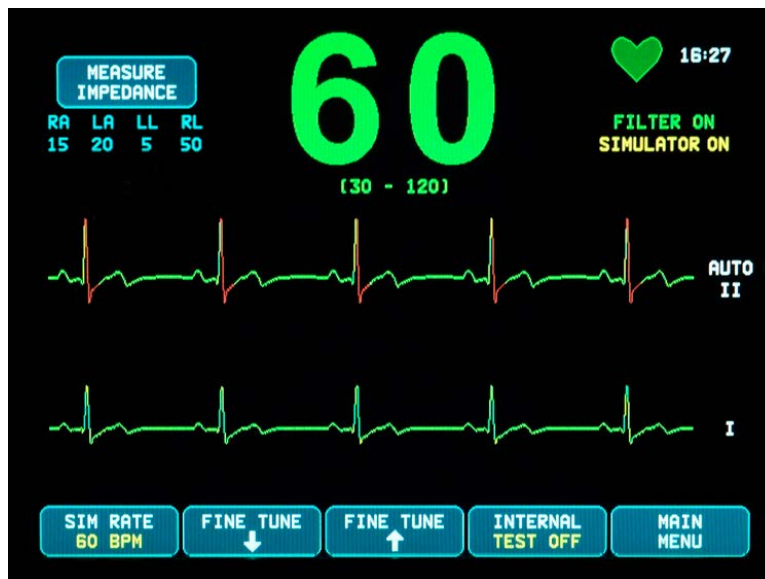

← Съобщение „SIMULATOR ON“ (ВКЛЮЧЕН СИМУЛАТОР)

За тестване на визуалните и звуковите аларми:

Ако алармите са поставени на пауза или с изключен звук, натиснете бутона , за да ги включите.

1. Задайте SIM RATE (СИМ. ЧЕСТОТА) на OFF (ИЗКЛ.) Проверете дали аларменото съобщение ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ) е показано на екрана и дали звуковата аларма е включена.
2. Изключете магистралния кабел за ЕКГ. Проверете дали съобщението LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) е показано на екрана и дали звуковата аларма е включена.

15.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Проверете дали:
<ul style="list-style-type: none">Апаратът не се включва.	<ul style="list-style-type: none">✓ Захранващият кабел е включен в монитора и в мрежовия контакт.✓ Електрическите предпазители не са изгорели.✓ Превключвателят ON (ВКЛ.) е натиснат.
<ul style="list-style-type: none">Тригер импулсът не функционира.	<ul style="list-style-type: none">✓ Размерът на ЕКГ е оптимален (изберете Lead II или AUTO)
<ul style="list-style-type: none">Изменчива ЕКГ крива. Не се отчита сърдечната честота.	<ul style="list-style-type: none">✓ Амплитудата на ЕКГ кривата е правилна (изберете Lead II или AUTO).✓ Разположението на електродите (вж. раздела за ЕКГ за диаграмата с правилното им поставяне).✓ Върху ЕКГ електродите има достатъчно количество контактен гел.<ul style="list-style-type: none">✓ Измерен импеданс <50 kΩ.✓ Извършете тестване на симулатора на ЕКГ.✓ Сменете магистралния кабел за ЕКГ и/или отвеждания, ако е необходимо.
<ul style="list-style-type: none">Без ЕКГ.	<ul style="list-style-type: none">✓ Магистралният кабел за ЕКГ е включен към ЕКГ входа на монитора.✓ Отвежданията са свързани към ЕКГ електроди.✓ Извършете тестване на симулатора на ЕКГ.✓ Сменете магистралния кабел за ЕКГ и/или отвеждания, ако е необходимо.

16.0 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

16.1 Монитор

При необходимост почиствайте външните повърхности на монитора с кърпа или тампон, навлажнен с вода. Не допускайте проникването на течности във вътрешността на уреда.



ВНИМАНИЕ:

- Не подлагайте монитора на стерилизация в автоклав, под налягане или с газ.
- Не го потапяйте в течности.
- Използвайте малко количество почистващ разтвор. Употребата на твърде много разтвор може да доведе до попадането му в монитора и до повреда на вътрешните компоненти.
- Не докосвайте, не натискайте и не търкайте дисплея и капаците с абразивни почистващи вещества, инструменти, четки, материали с груби повърхности и им позволявайте да влязат в контакт с предмети, които биха могли да надраскат дисплея или капаците.
- За почистване на монитора не използвайте разтвори на основата на бензин или ацетон, или други силни разтворители.

16.2 Магистрални кабели за ЕКГ и проводници на отвеждания



ВНИМАНИЕ: Не автоклавирайте магистрални кабели за ЕКГ или проводници на отвеждания.

Избършете кабелите с кърпа, навлажнена с вода. Никога не потапяйте кабелите в течност и не позволявайте проникването на течности в електрическите съединения.

16.3 Профилактична поддръжка

Сърдечният тригер монитор, модел 7600/7800, не се нуждае от профилактична поддръжка. Модел 7600/7800 не съдържа части, подлежащи на сервизно обслужване.

Преди да свържете монитора към нов пациент, проверете дали:

- Магистралните кабели за ЕКГ и проводниците на отвеждания са чисти и непокътнати.
- Съобщението LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) се показва на екрана, когато магистралният кабел за ЕКГ и/или проводниците на отвежданията не са свързани. При свързване на магистралния кабел за ЕКГ и проводниците на отвежданията със страничния симулатор съобщението LEAD OFF (ОТВЕЖДАНЕ ИЗКЛ.) изчезва.

17.0 АКСЕСОАРИ

17.1 Магистрални кабели за ЕКГ

REF	ОПИСАНИЕ
590432	МАГИСТРАЛЕН КАБЕЛ ЗА ЕКГ, 4 ОТВЕЖДАНИЯ, ЕКРАНИРАН, АНА, 10 FT
590446	МАГИСТРАЛЕН КАБЕЛ ЗА ЕКГ, 4 ОТВЕЖДАНИЯ, ЕКРАНИРАН, IEC, 10 FT
590479	МАГИСТРАЛЕН КАБЕЛ ЗА ЕКГ, 4 ОТВЕЖДАНИЯ, ЕКРАНИРАН, АНА/IEC, 40 IN
590477	МАГИСТРАЛЕН КАБЕЛ ЗА ЕКГ, 4 ОТВЕЖДАНИЯ, ЕКРАНИРАН, АНА/IEC, 5 FT
590478	МАГИСТРАЛЕН КАБЕЛ ЗА ЕКГ, 4 ОТВЕЖДАНИЯ, ЕКРАНИРАН, АНА/IEC, 10 FT

17.2 Метални проводници на отвеждания за ЕКГ

REF	ОПИСАНИЕ
590433	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, АНА, 24 IN
590447	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, IEC, 24 IN
590444	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, АНА, 30 IN
590448	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, IEC, 30 IN
590445	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, АНА, 36 IN
590449	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, МЕТАЛНИ, IEC, 36 IN

17.3 Въглеродни проводници на отвеждания за ЕКГ

REF	ОПИСАНИЕ
590435	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ ОТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, RT ВЪГЛЕРОД, АНА, 30 IN
590451	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, RT ВЪГЛЕРОД, IEC, 30 IN
590442	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ ОТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, RT ВЪГЛЕРОД, АНА, 36 IN
590452	ПРОВОДНИЦИ НА ОТВЕЖДАНИЯ ЗА ЕКГ, КОМПЛЕКТ 4 ОТВЕЖДАНИЯ, RT ВЪГЛЕРОД, IEC, 36 IN

Цветовете по АНА: бял, зелен, червен, черен
Цветовете по IEC: червен, черен, зелен, жълт

17.4 ЕКГ електроди и подготовка на кожата

REF	ОПИСАНИЕ
590436	ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ, ВЪЗРАСТНИ, 10x4/ОПАК., 10% КСІ, ЧАНТА
590436-CS	ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ, ВЪЗРАСТНИ, 15 ЧАНТИ ОТ 40, 10% КСІ, КАЛЪФ
590494	ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ, ВЪЗРАСТНИ, 10x4/ОПАК., 10% КСІ, ЧАНТА
590494-CS	ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ, ВЪЗРАСТНИ, 15 ЧАНТИ ОТ 40, 10% КСІ, КАЛЪФ
590291	NUPREP GEL, 4 OZ. ТУБА

17.5 Решения за монтиране

REF	ОПИСАНИЕ
590441	СТОЙКА С КОЛЕЛЦА С 3" МОНТАЖНА ПЛАСТИНА, СЕРИЯ 7000
3302-00-15	СТОЙКА С КОЛЕЛЦА АКСЕСОАР, 3" МОДУЛ С МОНТАЖНА ПЛАСТИНА, СЕРИЯ 7000

17.6 Разни аксесоари

REF	ОПИСАНИЕ
590035	ХАРТИЯ ЗА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО, 10 РОЛКИ/ОПАК.
590368	ХАРТИЯ ЗА ЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО, 100 РОЛКИ/КАСЕТА
590386	USB ПАМЕТ С ВИЗУАЛИЗАТОР ЗА ЕКГ

**За поръчка на аксесоари се обръщайте към
Службата за обслужване на клиенти:**

- Тел.: +1 800.247.4614
- Тел.: +1 203.481.4183
- Факс: +1 203.481.8734
- Имейл: sales@ivybiomedical.com

18.0 ИЗХВЪРЛЯНЕ

18.1 Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Изхвърлянето на устройства или консумативи трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и общностните закони и разпоредби.

Директива WEEE 2012/19/ЕС – Не изхвърляйте отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с общи отпадъци. В края на срока на експлоатация на продукта се обърнете към Службата за обслужване на клиенти на Ivy Biomedical Systems, Inc. за указания за връщане.



18.2 Директива 2011/65/ЕС относно ограничаване на опасните вещества (RoHS2)

Модел 7600/7800 и аксесоарите му отговарят на Директива RoHS2 2011/65/ЕС.

18.3 Стандарт на електронната промишленост на Китайската народна република SJ/T11363-2006

Таблица с токсични или опасни вещества и елементи за модел 7600/7800

Име на част	Токсични или опасни вещества и елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Окончателен механизъм на модел 7600/7800	X	O	O	O	O	O
Набор от части на опаковката	O	O	O	O	O	O
Опция с аксесоари	O	O	O	O	O	O

O: Указва, че токсичното или опасно вещество, съдържащо се във всичките хомогенни материали за тази част, е под граничните изисквания в SJ/T11363-2006.

X: Указва, че токсичното или опасно вещество, съдържащо се в поне един от хомогенните материали, използвани за тази част, е над граничните изисквания в SJ/T11363-2006.

Данните по-горе представляват най-добрата информация, налична по време на публикуване.



(EFUP) Екологично съобразен период на употреба - 50 години

Някои от консумативите или артикулите от производителя на оригинално оборудване могат да имат собствен етикет с по-кратък екологично съобразен период на употреба от този на системата, поради което този срок може да не се съдържа в таблицата. Този символ показва, че продуктът съдържа опасни материали, надвишаващи ограниченията, установени от китайския стандарт SJ/T11363-2006. Цифрата показва колко години продуктът може да се използва при нормални условия, преди опасните материали да причинят сериозна вреда на околната среда или здравето на хората. Настоящият продукт не трябва да се изхвърля като несортиран битов отпадък, а трябва да се събира отделно.

19.0 СПЕЦИФИКАЦИИ

ЕКГ

Избор на отвеждания:	
Отвеждане на тригер:	LI, LII, LIII и AUTO (АВТО) – избира се от менюто.
Второ отвеждане:	LI, LII и LIII – избира се от менюто.
Магистрален кабел за ЕКГ:	магистрален кабел за ЕКГ с 4 отвеждания с 6-пинов ААМІ стандартен конектор.
Изоляция:	изолиран от заземителни вериги до >4 kV rms, пик 5,5 kV
CMRR:	≥90 dB с магистрален кабел за ЕКГ с дисбаланс от 51 kΩ/47 nF
Входен импеданс:	≥20 MΩ при 10 Hz с магистрален кабел за ЕКГ
Честотна характеристика на LCD дисплей и записващо устройство:	Филтрирано: от 1,5 до 40 Hz или 3,0 до 25 Hz (зависи от конфигурацията) Нефилтрирана: от 0,67 до 100 Hz
Честотна характеристика на ЕКГ изход:	Нефилтрирана: от 0,67 до 100 Hz
Входен ток на отклонение:	всяко отвеждане <100 nA dc максимум
Изместване на потенциала на електрода:	±0,5 V DC
Ток за откриване на изключено отвеждане:	56 nA
Шум:	<20 μV пик до пик, отнася се до входа с всички отвеждания, свързани през 51 kΩ/47 nF към земята
Защита при дефибрилация:	защитен срещу потенциал 360 J разряд и потенциал за електрохирургия, време за възстановяване <5 секунди
Ток на утечка:	<10 μA при нормално състояние
Електрохирургични смущения	
Защита:	стандартна. Време на възстановяване <5 секунди
Вътрешен филтър:	50/60 Hz (автоматично).

Измерване на импеданса на електрода (само за модел 7800)

Техника на измерване:	10 Hz променлив сигнал <10 uA rms
Обхват на измерване:	200 kΩ на отвеждане
Точност на измерване:	±3% ±1 kΩ
Отвеждания за измерване:	RA, LA, LL, RL
Режим на измерване:	ръчно
Време за измерване:	<4 секунди; възстановяване на ЕКГ <8 секунди
Минимален препоръчителен Импеданс на електрода:	<50 kΩ
Препоръчителен електрод:	тип „гъба“ с 10% хлорид (Ivy REF: 590436)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Кардиотахограф

Диапазон:	от 10 до 350 уд./мин (дете/новородено) от 10 до 300 уд./мин (възрастен)
Точност:	$\pm 1\% \pm 1$ уд./мин
Разделителна способност:	1 уд./мин
Чувствителност:	300 μ V пик
Усредняване на сърдечна честота:	експоненциално усредняване, изчислено за една секунда, при максимално време за реакция от 8 секунди.
Време за реакция – Модел 7600:	
– Промяна от 80 до 120 уд./мин:	8 секунди
– Промяна от 80 до 40 уд./мин:	8 секунди
Време за реакция – Модел 7800:	
– Промяна от 80 до 120 уд./мин:	2 секунди
– Промяна от 80 до 40 уд./мин:	2 секунди
Реакция при неравномерен ритъм:	A1: 40 уд./мин, A2: 60 уд./мин, A3: 120 уд./мин, A4: 90 уд./мин (съгласно спецификация на IEC 60601-2-27, 201.7.9.2.9.101-b-4)
Отхвърляне на висока Т-вълна:	Отхвърля Т-вълни $\leq 1,2$ x R-зъбец

Подтискане на импулса на пейсмейкъра

Ширина:	от 0,1 до 2 ms при от ± 2 до ± 700 mV
Припокриване:	между 4 и 100 ms и не повече от 2 mV. Бързи ЕКГ сигнали: 1,73 V/s
Деактивиране на детектора:	избираемо от потребителя.



ВНИМАНИЕ: Импулсите на пейсмейкъра не са налични при изходите на задния панел.

Аларми

Висока честота:	15 до 250 уд./мин на стъпки от 5 уд./мин
Ниска честота:	10 до 245 уд./мин на стъпки от 5 уд./мин
Асистолия:	интервал от R до R >6 секунди
Изключено отвеждане:	отделено отвеждане
Проверка на отвежданията:	дисбаланс между отвеждания >0,5 V
Време до включване на аларма при тахикардия:	
V1 и V2:	<10 секунди
	Забележка: При половин амплитуда на V1 се показва предупредителното съобщение „LOW SIGNAL“ (СЛАБ СИГНАЛ) след по-малко от 5 секунди (не е аларма) (съгласно спецификация на IEC 60601-2-27, 201.7.9.2.9.101-b-6)
Ниво на звуково налягане на алармата:	76 dBA (силата на звука на алармата е настроена на ниска) до 88 dBA (силата на звука на алармата е настроена на висока)
Тонове на аларми:	съответстват на IEC 60601-1-8:2006, таблица 3, аларми с висок приоритет

Режим на тестване

Вътрешно:

ЕКГ 1 mV/100 ms (отнася се за входен сигнал при 70 уд./мин)

Симулатор:

Амплитуда на ЕКГ кривата: 1 mV
Обхват на симулатора: 10 – 250 уд./мин.

Честота на симулатора: на стъпки от 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 и 240 уд./мин
Регулируема в стъпки от 1 уд./мин.

Дисплей - Модел 7600

Вид: цветен сензорен TFT течнокристален дисплей, активна матрица (640 x 480)
Крива: двойни едновременни ЕКГ криви с функция „фиксиране“.
Размер на екрана: 13,25 cm x 9,94 cm, диагонал 16,5 cm (6,5 in)
Скорост на плъзване: 25, 50 mm/s

Дисплей – Модел 7800

Вид: цветен сензорен TFT течнокристален дисплей, активна матрица (640 x 480)
Крива: двойни едновременни ЕКГ криви с функция „фиксиране“.
Размер на екрана: 17,09 cm x 12,82 cm, диагонал 21,36 cm (8,4 in)
Скорост на плъзване: 25, 50 mm/s

USB порт и прехвърляне на данни (само за модел 7800)

Тип: USB флаш устройство (памет)
Съхранение за ЕКГ: 200 най-нови събития

Модул за Ethernet (Само за модел 7800)

Мрежов интерфейс: RJ45 (10BASE-T)
Съвместимост с Ethernet: версия 2.0/IEEE 802.3
Протокол: TCP/IP
Скорост на пакетите: 250 ms
Скорост на ЕКГ данни: 240 проби/s
IP адрес по подразбиране: 10.44.22.21
Канали: 2
Стандартна температура: 0 до 70°C (32 до 158°F)
Размер: 40 mm x 49 mm (1,574 x 1,929 in)

Механични данни - Модел 7600

Размер: Височина: 19,02 cm (7,49 in)
Ширина: 20,17 cm (7,94 in)
Дълбочина: 13,16 cm (5,18 in)
Тегло: 1,80 kg (3,9 lbs)

Механични данни – Модел 7800

Размер: Височина: 22,14 cm (8,72 in)
Ширина: 23,50 cm (9,25 in)
Дълбочина: 15,49 cm (6,10 in)
Тегло: 2,54 kg (5,6 lbs)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Записващо устройство

Метод на писане:	Директно термично
Брой криви:	2
Режими:	Direct (Директен) – ръчно записване Timed (Синхронизиран по време) – бутонът за разпечатване изпълнява 30-секунден запис Delay (Със закъснение) – записва 20 секунди преди и 20 секунди след появата на аларма при 25 mm/s. Записва 15 секунди преди и 15 секунди след появата на аларма при 50 mm/s. XRAY (Само за модел 7800) – записва 10 секунди преди и 10 секунди след излъчването на рентген
Скорости на хартията:	25 и 50 mm/s
Разделителна способност:	Вертикално – 200 точки/инч Хоризонтално – 600 точки/инч при ≤ 25 mm/s 400 точки/инч при > 25 mm/s
Честотен отговор:	> 100 Hz при 50 mm/s
Скорост на данните:	500 проби

Синхронизиран изходен сигнал (тригер)

Тестов входен сигнал на ЕКГ отвеждания:	Условия: $\frac{1}{2}$ синусоидна вълна, ширина 60ms, амплитуда 1mV, 1 импулс/секунда
Закъснение на изходния тригер:	< 2 ms
Точност на задействане от R до R:	± 75 μ s типичен при 1 mV вход
Ширина на импулса:	1 ms, 50 ms, 100 ms или 150 ms (зависи от конфигурацията)
Амплитуда на импулса:	0 V до +5 V или -10 V до +10 V (зависи от конфигурацията)
Полярност на амплитудата на импулса:	положителна или отрицателна (зависи от конфигурацията)
Изходен импеданс:	< 100 Ω
Настройка на чувствителността и прага:	напълно автоматична

Часовник за реално време

Разделителна способност:	1 минута
Дисплей:	24 часа
Изискване за хранване:	часовникът за реално време отчита времето, независимо дали мониторът е включен. Часовникът за реално време се хранва от специална литиева батерията, чийто срок на експлоатация е минимум 5 години при температура 25°C Забележка: Специалната литиева батерия за часовника за реално време е вградена в пакета SNAPHAT (не е отделна батерия) и затова се счита за „съдържаща се в оборудването“.

Работна среда

Температурен диапазон:	5°C до 40°C
Относителна влажност:	0% до 90% без кондензация
Надморска височина:	-100 метра до +3600 метра
Атмосферно налягане:	500 – 1060 mbar
Защита срещу проникване на течности:	IPX1 – Защита срещу вертикално падащи капки вода

Среда за съхранение

Температурен диапазон:	-40°C до +70°C
Относителна влажност:	5% до 95%
Надморска височина:	-100 метра до +14 000 метра

Изисквания за захранването:

Входно напрежение:	100 – 120 V~; 200 – 230 V~
Честота на линията:	50/60 Hz
Клас и тип предпазители:	T 0,5 AL, 250 V
Максимална консумация на променлив	
Консумация:	45 VA
Възстановяване на захранване:	автоматично, ако захранването бъде възстановено в рамките на 30 секунди

20.0 РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Апаратът отговаря на или надвишава спецификациите за:

- ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R) 2012 и A2:2010/(R) 2012
- IEC 60601-1 издание 3.1 (2012)/EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
- IEC 60601-1-2 4th издание (2014)
- IEC 60601-1-6:2010 (трето издание) + A1:2013; IEC 62366:2007 (първо издание) + A1:2014
- IEC 60601-1-8:2006 (второ издание) + изм. 1:2012
- IEC 60601-2-27 (2011)
- IEC 62304:2006
- CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 No 60601-1-2:2016
- Директива относно медицинските изделия 93/42/ЕИО
- CE 0413
- ISO 13485:2016
- RoHS2 2011/65/EC
- WEEE 2012/19/EC
- FDA/CGMP
- MDSAP



Медицинско оборудване

По отношение на токов удар, пожар и механични опасности само в съответствие с

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), CAN/CSA C22.2 № 60601-1 (2014),
IEC 60601-2-27 (2011), IEC 60601-1-6:2010 (трето издание) + A1:2013, IEC 60601-1-8: 2006 (второ издание) + изм.1: 2012



Ivy Biomedical Systems, Inc. декларира, че продуктът отговаря на Директива 93/42/ЕИО за медицински изделия на Съвета на Европейския съюз, когато се използва в съответствие с указанията, съдържащи се в Ръководството за работа и поддръжка.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Нидерландия



Евразийско съответствие (ЕАС): Този продукт е преминал всички процедури за оценка на съответствието (одобрение), които отговарят на изискванията на приложимите технически регламенти на Митническия съюз.